

ENDOPLUS

Definitivno punjenje

Endoplus masa je dvokomponentna pasta koja služi za zatvaranje kanala bazirana na epoksi smolama. Prednosti ove mase:

- Za definitivno zatvaranje kanala
- Izvanredna dimenzionalna stabilnost
- Izvrsna biokompatibilnost
- Samoljepljivost
- Visoka rendgenska vidljivost

Sastav:

Baza

- Epoksi oligomer smola
- Etilen gliko silikat
- Kalcijum fosfat
- Bizmut subkarbonat

Katalizator

- Poliaminobenzolat
- Trietanolamin
- Kalcium fosfat
- Bismut subkarbonat
- Cirkonium oksid
- Kalcijum oksid

Karakteristike:

Koristeći EndoPlus u kombinaciji sa gutaperkom, ovaj materijal pokazuje sljedeće osobine:

1. Lahko miješanje dvokomponentne paste
2. Sposobnost hermetičkog zatvaranja
3. Ne dovodi do promjene boje zuba
4. Jako dobra biokompatibilnost
5. Radno vrijeme 35min na 23°C (73°F)

Indikacije:

Trajno zatvaranje korjenskog kanala zuba i sekundarnog dentina u kombinaciji sa kanalnim otvorom.

Kontraindikacije:

Osjetljivost na epoksi vosak ili na druge komponente koje ulaze u sastav ovog proizvoda.

Miješanje endoplusa:

Šprica se sastoji od baze i katalizatora koja izbacuje masu automatski u omjeru 2:1. Aplicirati određenu količinu mase na papir za miješanje i izmješati dvije komponente 15-20 sekundi koristeći špatulu za miješanje dok se dvije mase u potpunosti ne sjedine.

Aplikacija Endoplus-a:

Kao standardna tehnika, endoplus se koristi zajedno sa gutaperkom, srebrenim ili titanijumskim kočicama. Tehnika punjenja se koristi kod kanala koji su predhodno tretirani endodonskim iglama. Aplicirati tanji sloj ednoplusa na kanalske zidove. Kod tehnike kočića, izabrati gutaperku (ili alternativno papirni poen, srebreni ili titanijumski kočić) veličine posljednje endodonciske igle koja je korištena. Aplicirati endoplus na kanalske zidove koristeći razvrtač ili pomoću lentule. Izbjegavati formiranje blaznica u materijalu ili prepunjavanjem kanala lentulom. Postaviti dezinficirani i suhi papirni poen u endoplus materijal i postaviti u kanal lagano. Endoplus je materijal koji se koristi za svakodnevnu stomatološku upotrebu.

Upozorenje:

- Endoplus sadrži pastu A i pastu B koje mogu uzrokovati osjetljivost kod ljudi. Ne koristiti proizvod kod ljudi koji su osjetljivi na bilo koji od ovih materijala.
- Izbjegavati kontakt sa očima kako bi izbjegli iritacije. Ako dodje u dodir sa očima, obavezno isprati oči sa većom količinom vode.
- Izbjegavati kontakt sa kožom ili sluznicom. Ukolikok bi došlo do kontakta, proizvod ukloniti pomoću vate i isprati zahvaćeno mjesto većom količinom vode. Ako bi došlo do upale sluzuzokože potražite pomoć liječnika.
- Ne gutati materijal. Ako bi došlo do gutanja popiti veću količinu vode.
- Izbjegavati prepunjenje. Sav višak ukloniti ukoliko dodje do prepunjenja kanala.

Nuspojave: materijal ne pokazuje određene nuspojave. Isključivo dolazi do alergije.

Način čuvanja: ovaj proizvod se koristi na sobnoj temperaturi. Neadekvatno čuvanje može smanjiti vijek trajanja materijala i sposobnost materijala. Čuvati na temperaturi između 18°C i 24°C sa dobro zatvorenim poklopcem. Čuvati dalje od UV zraka.

Komponente:

13,5gr dvokomponentna šprica (posjeduje bazu 9gr i katalizator 4,5gr)

Papir za miješanje

Špatulu

Uputu za korištenje