

„EUIGETIN“

zatvarač kanala baziran na cink-oksidi eugenolu

Indikacije:

Koristi se isključivo u stomatologiji od strane doktora. Eugetin se koristi kao zatvarač korijenskog kanala kod tretmana pulpitisa i svih formi periodontitisa, posebno kod punjenja kanala kod morfoloških promjena. Preporučuje se primjena ovog zatvarača zajedno sa gutaperkom.

Neželjena dejstva:

Oprezno koristiti proizvod kod pacijenata koji imaju alergiju na eugenol, jodine i kortikosteroide. Ukoliko postupate po pravilima te proizvod čuvate kako je propisano ne dolazi do neželjenih dejstava.

Sastav:

Eugetin se sastoji od seta sa prahom i tečnošću i spada u cink-oksidi eugenol klasu. Prah sadrži cink-oksidi, kalcijum-fosfat što podstiče regeneraciju kosti i koji se može lako uočiti na rentgenskim snimcima. Ima jako antiseptičko trajanje-timol jodide, aditivne analgetike. Smanjuje reakciju preapikalne boli. Tečnost sadrži eugenol. Debljina zatvarača je 3-5 µm što omogućava da antiseptički proizvod ulazi u mikrokanale i furkacije korjenskog kanala. Pasta se dobije kad se pomješaju Eugetin komponente na temperaturi od 23°C i ne gubi svoju plastičnost na podlozi za miješanje tokom 5-6 sati, a stvrdnjava se u kavitetu tokom 24-48 sati. Ukoliko je potrebno zatvarač se može odstraniti iz kanala bez velikog napora. Proizvod je adaptiran za korištenje u ekstremnom biološkom agensu na temperaturi od 32°C i 42°C (temperatura u ustima je 37±1°C) i na vlažnosti od 60±90%.

Način upotrebe:

Proizvod se miješa na temperaturi od 18°C-23°C i relativnoj vlažnosti od 45±55%. Za punjenje kanala pasta se dobije tako što se pomješa dva dozimetra (0,20-2,21g) praha sa jednom kapljicom (0,03g) tečnosti. Korjenski kanal je pripremljen pomoću gela ili tečnosti za uvećanje korjenskog kanala. Pasta se unosi u pripremljen i suh kanal pomoću kanalske igle ili instrumenta za punjenje kanala. Punjenje kanala ili uklanjanje se vrši instrumentom za punjenje sa niskim obrtajima. Treba obratiti pažnju da ne dođe do formiranja zračnih mehurića tokom tretmana. Zatvoriti proizvod nakon upotrebe.

Sadržaj:

Prah (teglica) 14g
Tečnost (bočica) 10ml
Mjerilica 1 kom
Podloga za mješanje 1 kom
Uputstvo za korištenje

Čuvanje:

Čuvati na temperaturi od 5°C-25°C.
Dobro zatvoriti bočice nakon korištenja.
Ne koristiti proizvod nakon isteka roka.
Rok trajanja 3 godine nakon proizvodnje.

Proizvođač:

„TehnoDent“ Co. Ltd
1/5 Beryozovaya str. severny
Belgorod region 308570
Tel/fax: (4722) 20-28-94, 20-28-95
e-mail: tehdent31@mail.ru