

„HEMOSTOP“ gel i tečnost sredstvo za povlačenje gingive i hemostazu

Indikacije:

Koristi se isključivo u stomatologiji od strane doktora u profesionalnim zdravstvenim ustanovama. Hemostop tečnost i gel se koristi kod tretmana dentalnih tkiva tokomo gingivalne retrakcije, za hemostaze i sok terapije.

Mjere opreza:

Koristiti sa oprezom. Ne miješati sa drugim proizvodima.

Neželjena dejstva:

Ukoliko se poštuju pravila transporta, skladištenja i korištenja, nema neželjenih efekata.

Sastav i klinička farmakologija:

Tečnost zaustavlja krvarenje kanala korijena zuba i sadrži aluminium hlorid heksahidrat (25%).

Tečnost se koristi za omogućuje gingivalno povlačenje tokom tretmana cervikalnog karijesa.

Hemostop gel kao glavnu komponentu sadrži aluminium-heksihidrat koji obezbjeđuje efektivne i brze hemostaze. Gel omogućuje aplikaciju „na mjesto“ i otpušta maksimalnu koncentraciju agensa za hemostazu u zonu krvarenja.

Ostale supstance u sastavu Hemostopa su cetrimid (mješavina kvaternarnih amonijakalnih soli - antiseptik) i sredstva za geliranje.

Tečnost i gel su namjenjeni za korištenje u agresivnim biološkim agensima na temperaturama između 32 i 42C (na temperaturi u ustima od 37±1C i vlažnošću od 60-90%).

Način upotrebe:

Hemostop tečnost se aplicira na željeno mjesto. Ukoliko krvarenje dolazi iz korjenskog kanala, papirni poen se umoče u tečnost i apliciraju u komoru pulpe. Krvarenje se u vedini slučajeva zaustavlja skoro momentalno, što omogućava nesmetani tretman u kanalu zuba i uspješno punjenje bez opasnosti od bojenja zuba. Kada se koristi za retrakciju gingive, konac za retrakciju se navlaži u tečnost i unosi u periodontalni sulkus.

Hemostop gel se koristi tako što se aplicira pomodu tampona namočenim u gel na mjesto koje krvari uz lagani pritisak u trajanju oko 1 minute.

Kada se koristi kod tretmana korijenskog kanala, gel se unosi u kanal pomodu papirne igle.

Za privremenu gingivalnu retrakciju kod tretmana cervikalnog karijesa, gel se aplicira na gingivu i retrakcija počinje momentalno i traje 20-30 min. Nakon tog vremena gingiva se vrada u prvobitno stanje.

Sadržaj pakovanja:

HEMOSTOP tečnost (bočica) 15ml

HEMOSTOP gel (šprica) 5ml

Uputstvo za korištenje

Tečnost i Gel se proizvode kao zasebni proizvodi.

Čuvanje:

Čuvati na temperaturi od 5C-25C.

Držati dalje od vlage.

Dobro zatvoriti bočice nakon korištenja.

Ne koristiti proizvod nakon isteka roka.

Rok trajanja 3 godine nakon proizvodnje.

Proizvođač:

„TehnoDent“ Co. Ltd

1/5 Beryozovaya str. severny

Belgorod region 308570

Tel/fax: (4722) 20-28-94, 20-28-95

e-mail: tehdent31@mail.ru