

## **„TEMPODENT“ proizvod za privremeno punjenje zuba**

### **Indikacije:**

Za upotrebu u stomatologiji. Za profesionalnu upotrebu. TEMPODENT se koristi kao privremeni ispun u prekrivanju dentalnog kaviteta tokom dubokog karijesa.

### **Kontraindikacije:**

Ukoliko se postuju pravila skladištenja, transporta i upotrebe, ne dolazi do kontraindikacija.

### **Sastav i klinička farmakologija:**

Baza proizvoda sadrži cink oksid, zink sulfat, dodatci. Proizvod je anmjenjen za upotrebu u agresivnom biološkom matriksu na temperaturi od 32°C i 42°C ( temperatura u ustima (37±1)°C i vlažnosti od 60-90%).

### **Način upotrebe:**

Prah Tempodenta se pomiješa sa destilovanom vodom na staklenom podmetacu tokom 1 minute da bi se dobila plastična konzistencija.

Pasta se postavlja u jednoj porciji u kavitet tako da prekrije lijek. Proizvod očrščava u roku od 10tak minuta. Tokom tog procesa. Mjesto treba biti izolovano od pljuvačke.

Preporučuje se i u pedodontiji zbog bolje konzistenciju i kako bi se spriječilo traumatiziranje prilikom korištenjem nasadnih uređaja. Napravljena pasta se koristi u manjim porcijama, oblikovajući ga instrumentima. Proizvod očvrščava pomoću pljuvačke tokom 30 minuta.

**Upozorenje!** Nakon upotrebe, čvrsto zatvoriti pakovanje.

### **Pakiranje:**

Prah 80g ili

Pasta 50g

Proizvodi mogu biti prodavani pojedinačno.

### **Čuvanje:**

Čuvati na temperaturi od 5°C do 25°C.

Ne koristiti nakon isteka roka.

Rok trajanja 3 godine nakon datuma proizvodnje.

### **Proizvođač:**

„Tehnodent“ Co.Ltd

1/6 Beryozovaya str. Severnyi,

Belgorod region 308570

Tel/Fax: (4772)20-28-94, 20-28-95

e-mail: [tehdodent31@mail.ru](mailto:tehdodent31@mail.ru)