

POLIREN **paste za poliranje**

Indikacije:

Poliren - 1- se koristi kod uklanjanja kamenca bez oštachenja cakline.

Poliren - 2- se koristi za poliranje prije restauracije ili izbjeljivanja zuba, prije zatvaranja fisura, za uklanjanje plaka, kamenca i kod profesionalnog ciscenja zuba.

Poliren - 3- se koristi za završnu obradu kompozita i glas-ionomer materijala.

Moguće kontraindikacije:

Ukoliko se poštuju pravila skladištenja, transporta i poštuju upute korištenja, ne dolazi do kontraindikacija.

Način upotrebe:

Prije aplikacije Poliren 1 paste, neophodno je zaštititi gingivu od kiseline koje sadrži pasta. Pasta se treba aplicirati precizno na mjesto plaka 3-5 minuta. Zatim proširi na površinu koristeći okrugle četkice ili gumene kapice na srednjoj brzini bez velikih problema.

Za aplikaciju Poliren 2 paste manja količina paste se treba postaviti na okruglu četkicu. Tretirati površinu ili fisuru zuba na srednjoj brzini bez velikih naprezanja. Zatim se mjesto čisti sa vodom i suši gdje se nastavlja tretman.

Prije aplikacije Poliren 3 paste neophodno je ukloniti višak materijala za punjenje pomoću dijamanitnih borera te ispun treba da bude suh. Zatim aplicirajte pastu i bez pritiska na srednjoj brzini tretirajte površinu ispuna, dodavajući kapljice vode tokom 1 minute.

Kod velike gustoće, dodati par kapljica destilovane vode i miješati do željene gustoće.

Zatvoriti bočice nakon korištenja.

Sadržaj pakovanja:

Poliren pasta br. 1 šprica 8g ili plastična kutija 45g ili tuba 50g

Poliren pasta br. 2 šprica 8g ili plastična kutija 45g ili tuba 50g

Poliren pasta br. 3 šprica 8g ili plastična kutija 45g ili tuba 50g

Uputstvo za korištenje

Proizvodi se pakuju i prodaju odvojeno i pojedinačno.

Čuvanje:

Čuvati na temperaturi od 5°C do 25°C.

Ne koristiti nakod isteka roka upotrebe.

Proizvođač:

„TehnoDent“ Co. Ltd

1/5 Beryozovaya str. severny

Belgorod region 308570

Tel/fax: (4722) 20-28-94, 20-28-95

e-mail: tehnodent31@mail.ru