

FLOW-CLEANS-PROFI

Prah za pjeskarenje

INDIKACIJE

Stručna upotreba je u zdravstvenoj ustanovi. Prah FLOW-CLEANS-PROFI koristi se za uklanjanje plaka i mekih naslaga s supragingivne površine zuba, od izloženih korijena; Za čišćenje pukotina prije zatvaranja; Za uklanjanje mrlja pušača i za nježno izbjeljivanje cakline bez hiperestezije zubi.

POSEBNE MJERE PREDOSTOŽNOSTI

Lijek indosikrazija. Koristite s velikom pažnjom za alergične pacijente na arome hrane. Nemojte zloupotrebjavati lijek.

MOGUĆI NEŽELJENI UČINCI

Ako su uvjeti pohranjivanja, transporta i praćenja uputa zadovoljeni, ne postoje štetni učinci.

SASTAV I KLINIČKA FARMAKOLOGIJA

Prah FLOW-CLEANS-PROFI nanosi se prema metodi pjeskarenja s mlazom abrazivnog zraka i vode (Air-Flow). Prašak učinkovito čisti tvrda tkiva, izbjeljuje i dodaje zdravi sjaj na zube. Abrazivna komponenta je mješavina kalcijevog karbonata i kalcijevog fosfata s natrijevim bikarbonatom veličine čestica 50-70 um, što omogućuje provođenje štedljivog čišćenja cakline. Struktura praha sadrži sredstvo protiv zgrušavanja. Prah je proizveden u ukusu: neutralan i aromatiziran (mint, trešnja, ribiz, citrus, višekratno voće). Nakon čišćenja s aromatiziranim prahom, u ustima se pojavljuje ugodan okus osvježenja.

NAČIN UPOTREBE

Prah FLOW-CLEANS-PROFI koristi se u skladu s uputama, koji se nalaze u uređajima za pjeskarenje za zubno poliranje ili na zubnim instrumentima različitih dijelova: KaVo Profi Flex 3, Satelec Air-max, Air-Flow Handy, NSK Prophy-Mate neo, Jedinice za pročišćavanje zraka.

Prije upotrebe praha potrebno je zaštititi oči naočalama i kosu potrošnom kapom. Pacijenta sa kontaktnim lećama upozoriti o mogućem upadanju prašine. Kutovi usta pacijenta trebaju biti namazani vazelinom; Trebali biste postaviti usisivač u kut usta pacijenta.

Prije uporabe potrebno je napuniti spremnik praškom na pola volumena i podići način podnošenja mlaznog komprimiranog zraka, vode i praha koji se ne usmjerava u šupljinu usta pacijenta.

Nemojte usmjeravati mlaz praha u jednu točku i prskati kružnim pokretima, potrebno je obraditi svaku površinu zuba ne više od 4 sekunde. Na završnom zatvaranju potrebno je čistiti ruku jedinice od praha! Ne ostavljajte prah u spremniku! Držite dalje od vlage!

SADRŽAJ

Prašak (posuda) 220g ILI 250g ILI 300g

Instrukcije za korištenje 1 komad

SKLADIŠTENJE

Čuvajte na temperaturi od 5 ° C do 25 ° C. Čuvajte ga suhim! Zatvoriti spremnik praha neposredno nakon upotrebe. Nemojte ga koristiti nakon isteka roka. Rok trajanja: 3 godine od datuma proizvodnje.

Proizvođač:

„TehnoDent“ Co. Ltd

1/5 Beryozovaya str. severny

Belgorod region 308570

Tel/fax: (4722) 20-28-94, 20-28-95

e-mail: tehdent31@mail.ru