

„GlassyCem“ kondicioner

INDICIJE ZA UPOTREBU:

Za profesionalnu upotrebu u medicinsko-profilaktičkim ustanovama. Polialkanski modifikovani materijal GLASSYCEM namenjen je za formiranje osnovnog sloja za kompozitne restauracije.

Kontraindikacije:

Individualna netolerancija. Ne koristite neadekvatno.

NEŽELJENE REAKCIJE:

U pravilnom skladištenju, transportu i poštovanju uputstva za upotrebu, nema neželjenih reakcija.

OPIS MATERIJALA:

GLASSYCEM sastoji se od:

- kondicioner

Kondicioner je vodeni rastvor poliakrilne kiseline (12%) plave boje. Kondicioniranje površine značajno poboljšava adheziju i jonsku razmjenu između strukture zuba i staklo-jonomerskog cementa. Materijal je namenjen upotrebi u neprijateljskom biološkom okruženju u temperaturnom rasponu od 32°C do 42°C (u ustima (37 ± 1) °C i vlažnosti (60-90%)).

NAČIN UPOTREBE-Priprema površine (kondicioniranje): Kada je duboka karijes, celulozu treba zaštititi materijalom na bazi kalcijum-hidroksida. Pripremljena, oprana i osušena površina treba tretirati pomoću aplikatora (pamučnog brisača ili sunđera) sa uređajem. Za 10-15 sekundi, ispraznite šupljicu vodom i malo osušite dok ne primite brilijantnu površinu. **NEMOJTE PRESUŠITI!**

Pažnja!

NEMOJTE MIJEŠATI prašak ili tečnost sa ostalim komponentama staklenoionomernih cementa. U slučaju dodira materijala sa tkaninom usne šupljine, kože ili kontakt sa očima odmah uklonite materijal i isprati vodom. Kondicioner i lak se proizvode odvojeno.

SKLADIŠTENJE:

Čuvati na temperaturi od 5 ° C do 25 ° C. Držati na suhom!

Čvrsto zatvorite tečnost odmah nakon upotrebe.

Rok upotrebe: 3 godine od datuma proizvodnje.

Proizvođač:

„TehnoDent“ Co. Ltd

1/5 Beryozovaya str. severny

Belgorod region 308570

Tel/fax: (4722) 20-28-94, 20-28-95

e-mail: tehdent31@mail.ru