

„Polyacrilin varnish“ lak

INDICIJE ZA UPOTREBU:

Za profesionalnu upotrebu u medicinsko-profilaktičkim ustanovama. Polialkanski modifikovani materijal Polyacrilin varnish za formiranje osnovnog sloja za kompozitne restauracije.

Kontraindikacije:

Individualna netolerancija. Ne koristite neadekvatno.

NEŽELJENE REAKCIJE:

U pravilnom skladištenju, transportu i poštovanju uputstva za upotrebu, nema neželjenih reakcija.

OPIS MATERIJALA:

-lak

Lak sadrži materijal za formiranje filma u jednostavnom rastvaraču. Zaštitna tanka folija izoluje zupčanje zuba u fazi zrelosti efekata pljuvačke i daje estetsku sjajnost pečata. Set materijala je namenjen upotrebi u neprijateljskom biološkom okruženju u temperaturnom rasponu od 32°C do 42°C (u ustima (37 ± 1) °C i vlažnosti (60-90%)).

NAČIN

Nakon postavljanja materijala, punjenje treba da bude premazano tankim slojem završnog premaza, koristeći aplikator, i osušiti sa delikatnim zračnim tokom. Za 10 minuta može se obaviti brušenje i poliranje pomoću paste za poliranje. Nakon obrade treba naneti zaštitni sloj završnog sloja i površina za punjenje mora biti osušena.

Preporučiti pacijentu da izbegne obrok u roku od 2 sata i maksimalno opterećenje masti u roku od jednog dana.

SKLADIŠTENJE:

Čuvati na temperaturi od 5 ° C do 25 ° C. Držati na suhom!

Čvrsto zatvorite prašak i tečnost za posudu odmah nakon upotrebe.

Rok upotrebe: 3 godine od datuma proizvodnje.

Proizvođač:

„TehnoDent“ Co. Ltd

1/5 Beryozovaya str. severny

Belgorod region 308570

Tel/fax: (4722) 20-28-94, 20-28-95

e-mail: tehdent31@mail.ru