

"DESENSETIN"

Suspencija kod preosjetljivosti zuba

INDIKACIJE

Profesionalna upotreba u zdravstvenoj ustanovi.

Suspencija **DESENSETIN** se koristi za odontotropy u zubnoj kontroli zuba. Moguća je klinička i kućna upotreba.

POSEBNE MJERE PREDOSTROŽNOSTI

Lijek idiosinkrazija.

Koristite sa velikom pažnjom za pacijenta sa alergijom.

Nemojte zloupotrebjavati.

MOGUĆI NEŽELENI EFEKTI

Ako su ispunjeni uslovi skladištenja, transporta i instrukcija, ne postoje štetni uticaji.

KOMPOZITON I KLINIČKA FARMAKOLOGIJA

Suspencija na bazi vode **DESENSETIN** sadrži arginin, kalcijum-fosfat, natrijum-fluorid i ukus. Poslje primjene na površini zuba arginin formira kompozit sa visokim kapacitetom za puferovanje, blokira kisele napade i smanjuje bol.

Materijal se proizvodi za upotrebu u agresivnoj biološkoj matrici s temperaturnim opsegom između 32 ° C i 42 ° C (u usta šupljine na temperaturi (37 ± 1) ° C i vlažnosti 60-90%).

UPOTREBA

Prije upotrebe suspencije **DESENSETIN** neophodno je očistiti, dezinfikovati i sušiti oštećeni dentin. Nanesite suspenciju čistom četkom na zube i uhvatite je u oštećenu površinu. Dodatna količina suspencije se često primenjuje bez oštećenja prethodne strukture. Pacijentu se preporučuje da se uzdrži od hrane u toku 2 sata nakon procedure, da izbjegava kiselo piće i voće tokom 3-5 dana nakon procedure. Za dobre rezultate koristite ovu suspenciju 2-3 puta tokom 7-10 dana.

Zatvorite materijale čvrsto nakon upotrebe.

SADRŽAJ

Suspencija (špic) 5 ml

Uputstvo za upotrebu 1 komad

SKLADIŠTENJE

Čuvati na temperaturi od 5 ° C do 25 ° C.

Ne koristite nakon isteka roka upotrebe.

Rok upotrebe: 3 godine od datuma proizvodnje.

Proizvođač:

„Tehnodent“ Co.Ltd

1/6 Beryozovaya str. Severnyi,

Belgorod region 308570

Tel/Fax: (4772)20-28-94, 20-28-95

e-mail: tehnodent31@mail.ru