

## "FTOR-LUX" - KIT

Dentalni komplet kod duboke penetracija za fluoridacij emajla i dentina

### **Indikacije:**

*FTOR-LUX* dentalni komplet za fluoridaciju kod duboke penetracije, koristi se za tretman dentina kod dubokih šupljina i zaštitu pulpe prije punjenja, u preventivnom održavanju i liječenju primarnog i sekundarnog raspadanja zuba, macula cariosa kariesa, kao i za preventivne tretmane karijesa prije i poslije korišćenja ortodontskih aparata, za hermetičko zaptivanje fisura bez pripreme emajla (cakline), za tretman mliječnih zuba, umnjaka, kao i za tretman tvrdih tkiva u lečenju parodontitisa.

### **Mjere opreza:**

Idiosinkrazijski lijek. Nemojte zloupotrebjavati.

### **Neželjena dejstva:**

Ukoliko se poštuju pravila transporta, skladištenja i korištenja, nema neželjenih efekata.

### **Sastav i klinička farmakologija:**

*FTOR-LUX* dentalni komplet za fluoridaciju kod duboke penetracije, uključuje tečnosti (№1 i №2). Tečnost broj 1 na vodenoj bazi sadrži jone fluora, bakra i magnezijuma. Tečna suspenzija №2 sadrži mikroatomske kalcijum hidroksid u destilovanoj vodi. Pri uzastopnoj primeni ovih tečnosti, formiraju se mikrokristali visoke kvašljivosti soli kalcijum fluorida, bakra i magnezijuma u tretiranim dentinskim tubulama i mikrodefektima emajla koji pružaju duboko produženo fluoriranje tvrdih tkiva i dugačku baktericidnu aktivnost.

Duboka fluoracija pripremljenog dentina ne smanjuje adheziju proizvoda za obnavljanje i zaptivača.

### **Način upotrebe:**

Prije upotrebe dobro promućkati.

Čvrsti zatvorite proizvode nakon upotrebe.

Prije upotrebe dentalnog kompleta, očistite zube, operite vodom, pažljivo osušite mlazom komprimovanog vazduha i primenite tečnost broj 1. Sačekajte 1 minut za duboku infiltraciju, lagano osušite zub za koncentraciju tečnosti i na pripremljenu površinu trljanjem nanesite tečnost broj 2, koja sadrži kalcijum hidroksid.

Za učvršćivanje postignutog efekta postupak treba ponoviti za 1-2 tjedna, a u daljem procesu neophodno je tretman ponoviti 1-2 puta u toku od jedne godine.

Za obradu pripremljenog dentina koristite gore opisanu tehniku primene.

Za obradu dubokih šupljina sa tankim slojem perforiranog dentina, a takođe i za nanošenje na pulpu vitalnog zuba, potrebno je striktno se pridržavati sekvence nanošenja tečnosti: prvo, utrljavanjem u šupljinu, tečnost - suspenzija broj 2 (koja sadrži kalcijum hidroksid za zaštitu pulpe), sačekajte 1 minutu i onda nanesite tečnost broj 1. Zatim osušite površinu i nakon 1 minute ponovo nanesite tečnost broj 2 (na isti način kao prvi put). Nakon tretmana duboke šupljine dentalnim kitom, izvršite planirane intervencije na restauraciji: jetkanje i ostale procedure za pripremu površine; nanošenje adheziva i obnavljanje.

U tretmanu parodontitisa tvrda tkiva zubnog dela subgingivalnog dela konzistentno se primjenjuju tečnost broj 1 i tečna suspenzija broj 2 za duboku fluoraciju. Gingivalni džep se dodatno tretira tečnom suspenzijom broj 2. Zatim bez ispiranja neophodno je tretirati gingivalna tkiva sa privremenim zavojem prije sljedeće posjete za 2-3 dana.

Na sljedećoj posjeti doktor će procijeniti efikasnost terapije i prepisat će sljedeće tretmane pojedinačno.

Za smanjenje osetljivosti na cervikalnom dijelu zuba, nakon čišćenja pomoću četke i pažljivog sušenja zuba toplim vazduhom, cervikalni dio zuba se obilno navlažuje u periodu od 30 sekundi uz pomoć pamučne kugle impregnirane tečnošću broj 1. Bez ispiranja, cervikalna zona zuba takođe se

pažljivo navlaži kalcijum-hidroksidom (tečnost broj 2) u periodu od 30 sekundi, lagano trljajući u zoni defekta. Nakon toga vrši se postupak pranja obrađene površine.

Nakon dvostrukog ponavljanja za 1-3 nedelje potrebno je ponoviti postupak 1-2 puta u toku jedne godine.

**Sadržaj pakovanja:**

Tečnost broj 1 (bočica sa kapalicom) 10ml

Tečnost broj 2 (bočica sa pipetom) 10ml

Uputstvo za korištenje

**Čuvanje:**

Čuvati na temperaturi od 5°C-25°C.

Dobro zatvoriti bočice nakon korištenja.

Ne koristiti proizvod nakon isteka roka.

Rok trajanja 3 godine nakon proizvodnje.

**Proizvođač:**

„TehnoDent“ Co. Ltd

1/5 Beryozovaya str. severny

Belgorod region 308570

Tel/fax: (4722) 20-28-94, 20-28-95

e-mail: [tehdent31@mail.ru](mailto:tehdent31@mail.ru)