

Tečnost za dehidraciju i odmaščivanje

Indikacije:

Koristi se isključivo u stomatologiji od strane doktora u profesionalnim zdravstvenim ustanovama. Tečnost za dehidraciju i odmaščivanje koristi se za terapiju tvrdih tkiva prije popunjavanja šupljine ili cementiranja krunica.

Mjere opreza:

Koristiti sa oprezom. Idiosinkrazijski lijek. Nemojte zloupotrebjavati.

Neželjena dejstva:

Ukoliko se poštuju pravila transporta, skladištenja i korištenja, nema neželjenih efekata.

Sastav i klinička farmakologija:

Tečnost za dehidraciju i odmaščivanje upotrebljava se prije punjenja zuba ili cementacije krunice. Ovo je visoko-isparljiva tečnost na bazi smješe rastvarača koja ne sadrži etil oksid; uklanja vodu i masnoće sa površine vrlo efikasno u toku 1 minute. Primjena tečnosti za dehidraciju i odmaščivanje zubnih kanala i tvrdih zubnih tkiva na zubu nije bolno. Tečnost se proizvodi za upotrebu u agresivnom biološkom okruženju sa temperaturnim rangom između 32-42°C (temperatura u ustima je 37±1°C i vlažnosti 60-90%).

Način upotrebe:

Tečnost se koristi uz pomoć uskog pamučnog brisa ili papirnog poena. Tečnost za dehidriranje i odmaščivanje zasićuje uski pamučni tampon i koristi se za temeljno tretiranje kanala, pulpe i krunice zuba. Dehidriranje i odmaščivanje zubnog kanala odvija se tokom 1 minute bez upotrebe mlaza zraka za sušenje komprimovanog vazduha. Zubna krunica se tretira sa tečnošću i suše sa mlazom komprimovanog vazduha pre cementacije.

Upozorenje! Nakon upotrebe treba čvrsto zatvoriti bocu sa tekućinom.

Sadržaj pakovanja:

Tečnost za dehidraciju i odmaščivanje (bočica) 15ml ili 30ml
Uputstvo za korištenje

Čuvanje:

Čuvati na temperaturi od 5°C-25°C.

Upozorenje! Tečnost za dehidraciju čuvati van domašaja vatre!

Dobro zatvoriti bočicu nakon korištenja.

Ne koristiti proizvod nakon isteka roka.

Rok trajanja 3 godine nakon proizvodnje.

Proizvođač:

„TehnoDent“ Co. Ltd

1/5 Beryozovaya str. severny

Belgorod region 308570

Tel/fax: (4722) 20-28-94, 20-28-95 ; e-mail: tehnodent31@mail.ru

Proizvođač:

„Tehnodent“ Co.Ltd

1/6 Beryozovaya str. Severnyi,

Belgorod region 308570

Tel/Fax: (4772)20-28-94, 20-28-95

e-mail: tehnodent31@mail.ru