

## **Durosil L:**

Ireverzibilni hidrokolid za uzimanje otiska. Karakteriziraju ga lahko rukovanje u početnoj fazi te jako dobra krutost nakon očvršćavanja. Preporučuje se za uzimanje dvostrukog otiska.

### **Aplikacija:**

- Dvostruki korektivni otisak;
- Situacioni otisak

### **Doziranje:**

Pomoću kašikice uzeti manju količinu Durosil L i posuti po rukama. Zatim uzeti odgovarajuću količinu praha (kako bi postigli odgovarajuću količinu kašiku tokom vađenja nagegi na kutiju kako bi poravnali prah sa rubovima kašike). Na tu količinu, dodati 2 reda President očvršćivača 4cm.

**Čuvanje otiska:** čuvati na sobnoj temperaturi u vlažnim uvjetima.

**Čuvanje:** ne čuvati na temperaturi većoj od 27°

**Vrijeme miješanja:** 0:30min

**Radno vrijeme:** 1:15min

**Vrijeme u ustima:** 3:30min

**Vrijeme vezivanja:**5:00min

**Napreznja tokom kompresije:**2-8%

**Oporavljanje od deformacije:** >99%

**Promjena nakon 24h:** <0.7%

## **Durosil S:**

Nisko viskozni, tečni hidrokompabilni polisiloksan. Preporučuje se za uzimanje dvostrukog otiska.

**Čuvanje:** čuvati na sobnoj temperatur u vlažnim uvjetima nei većoj od 27°C

**Napreznja tokom kompresije:**2-5%

**Oporavljanje od deformacije:** >98%

**Promjena nakon 24h:** <0.2%

**Vrijeme vezivanja:**4:30min

**Vrijeme miješanja:** 0:30min

**Radno vrijeme:** 1:15min

**Vrijeme u ustima:** 3:15min

## **Učvršćivač:**

Pasta za učvršćivanje Durosil otisnih materijala.