

„CRESOTIN“ Tečnost br. 2 za antiseptički tretman korijenskih kanala

Indikacije:

Koristi se isključivo u stomatologiji od strane doktora u profesionalnim zdravstvenim ustanovama. **CRESOTIN** tečnost br.2 koristi se za antiseptičku obradu zaraženih kanala zuba kod naprednog pulpitisa, kao i kod resekcije apeksa korijena.

Mjere opreza:

Idiosinkrazijski lijek. Nemojte zloupotrebljavati.

Neželjena dejstva:

Ukoliko se poštuju pravila transporta, skladištenja i korištenja, nema neželjenih efekata.

Sastav i klinička farmakologija:

CRESOTIN Liquid №2 sadrži: fenol, formaldehid - antiseptik, mehanizam njihovog dejstva povezan je sa denaturacijom proteina mikroorganizama, koji obezbeđuje antiseptičku osobinu i duboku mumifikaciju, kao i sterilizaciju kanala korijena zuba.

Proizvod je namjenjen za korištenje u agresivnim biološkim agensima na temperaturama između 32 i 42°C (na temperaturi u ustima od 37±1°C i vlažnošću od 60-90%).

Način upotrebe:

CRESOTIN tečnost №2, se nanosi koristeći uske pamučne tampone koji su zasićeni tečnošću i blago istisnutim vani, kako bi se izbjeglo curenje preparata; zadržava se u otvoru zubnog kanala pod privremenim punjenjem tokom 2-3 dana. Inficirani kanali se obrađuju sa zasićenim pamučnim tamponima, koji se mogu koristiti za privremenu punjenje koje se čuva u kanalu. Neophodno je ukloniti pamučni tampon za 2-3 dana, obraditi kanal, te uraditi proces ponovo i zapečatiti sterilni kanal korena pomoću paste **CRESOTIN**. Nakon popunjavanja kanala neophodno je izvršiti zatvaranje pomoću glas-jonomer cementa i obnoviti krunu zuba.

U slučaju alergijskih reakcija kod osetljivih pacijenata potrebno je ukloniti pastu i obustaviti dalje korišćenje.

Zatvorite materijale čvrsto nakon upotrebe.

Sadržaj pakovanja:

Tečnost (bočica) 15ml

Uputstvo za korištenje

Čuvanje:

Čuvati na temperaturi od 5°C-25°C.

Dobro zatvoriti bočicu nakon korištenja.

Ne koristiti proizvod nakon isteka roka.

Rok trajanja 3 godine nakon proizvodnje.

Proizvođač:

„TehnoDent“ Co. Ltd

1/5 Beryozovaya str. Severny

Belgorod region 308570

Tel/fax: (4722) 20-28-94, 20-28-95 ;

e-mail: tehdent31@mail.ru