

## **HEMOSTOP-A**

### **Pasta za tretman rana nakon ekstrakcije**

#### **INDIKACIJE:**

Oblast - Stomatologija. Za profesionalnu upotrebu u medicinskim ustanovama. HEMOSTOP-A pasta se koristi za tretman rana nakon ekstrakcija.

#### **KONTRAINDIKACIJE:**

Individualna netolerancija.

#### **NEŽELJENI EFEKTI:**

Pri pravilnom skladištenju, transportu i poštovanju uputstva za upotrebu, neželjeni efekti ne postoje.

#### **OPIS MATERIJALA:**

Hemostatična pasta je viskozna masa koja se lako formira i sadrži: jodoform, natrijum alginat, hijaluronsku kiselinu, antiseptički kompleks vitamina, formator punila i paste.

Pasta dobro izolira i oblaže površinu sluznice i postupno bubri i otapa se. Nema potrebe za uklanjanjem ostataka paste.

#### **NAČIN PRIMJENE:**

Materijali su namijenjeni za upotrebu u agresivnom biološkom okruženju u temperaturnom rasponu od 32 ° C do 42 ° C (u uvjetima usne šupljine na temperaturi od  $(37 \pm 1)$  ° C i vlažnosti od 60-90%).

Hemostatična pasta se utiskuje na površinu rane, lijepi i lagano se rasteže sa 1 mm ravnim slojem. Nakon uklanjanja, zubna pasta se kotrlja kao lopta i bez napora unosi se u rupu. Pasta je biorazgradiva i ne zahteva uklanjanje.

#### **Pažnja!**

Posle svake primene bočice i špricevi sa materijalima moraju biti pažljivo zatvoreni. Neusklađenost sa ovim zahtjevom dovodi do smanjenja roka trajanja materijala.

#### **PAKOVANJE:**

Hemostatska pasta (plastična tegla) 35 ml

Uputstvo za upotrebu 1 kom

#### **SKLADIŠTENJE:**

Čuvati na temperaturi od 5 ° C do 25 ° C. Posudu odmah zatvorite odmah nakon upotrebe. Ne koristiti nakon isteka roka trajanja. Rok trajnosti: 3 godine od datuma proizvodnje.

#### **PROIZVOĐAČ:**

“TehnoDent” Co.

Ul. Beryozovaya 1/6, Severnyi,

Belgorodska regija 308570

Tel / Fax (4722) 20-28-94, 20-28-95.

E-mail: tehnodent31@mail.ru