

Svjetlosno polimerizirajuća zaštita

CE 93/42 KLASA: I

1. **Opšti opis:** **Wdam** maska je svjetlosno polimerizirajuća brana za zaštitu gingive koja se koristi tokom tretmana izbjeljivanja. Proizvod pripada klasi I. Isključivo za upotrebu od strane profesionalca.
2. **Sastav:** dimet akrilil alfatik i aromatik monomer na bazi smole
3. **Pakovanje i način upotrebe:** **Wdam** pakovanje se sastoji od jedne šprice 3cc/3,5 gr tečne zaštite, nastavci za mješanje i igle za aplikaciju.
4. **Indikacije:** **Wdam** je svjetlosno polimerizirajuća maska koja se koristi za zaštitu gingive tokom tretmana izbjeljivanja zuba. Lahko se nanosi zbog njegove tečne konzistencije. Jako dobro prijanja u proksimalne dijelove zuba. **Wdam** se nalazi u špricama te ne dolazi do pojave mjehurića tokom korištenja. Nakon tretmana se lahko skida sa površine sluznice i zuba.
5. **Kontraindikacije:** ne koristiti proizvod na pacijentima koji su alergični na bilo koji od ovih komponenata.
6. **Upozorenje:** Koristite zaštitne rukavice, naočale i masku. Proizvod je iritantan za respiratorni sistem. Izbjegavajte kontakt sa očima i kožom. Ukoliko dodje do kontakta, zahvaćeno područje isprati vodom; potražiti medicinski savjet u koliko dođe u kontakt sa očima. Ukoliko bi došlo do gutanja gela, popiti veće količine vode i potražiti liječnika.
7. **Aplikacija:**
 - Skinuti zaštitni čep i staviti nastavak. Vratiti čep nakon korištenja.
 - Obratiti pažnju da su zubi koji se tretiraju potpuno čisti.
 - Nanijeti **Wdam** svjetlosno polimerizirajuću zaštitu sa 4-6mm debljine.
 - Aplikirati **Wdam** na susjedne zube koji se neće tretirati i zatvoriti sve aproksimalne dijelove. Dobro zaštititi gingivu.
 - Vrijeme polimerizacije koristeći lampu je otprilike 20/40 sekundi.
 - Aplikirati gel za izbjeljivanje po uputama korištenja.
 - Gel isprati vodom nakon korištenja.
8. **Držanje:** Čuvati proizvod na temperaturi između 5°C do 22°C, izbjegavati izlaganje velikim toplotama i direktnom suncu. Držati u frižideru tokom ljetnog perioda. Nakon upotrebe poklopac vratiti na špricu. Ukoliko pravilno postupate proizvod se može koristiti do isteka roka koji je otisnut na ambalaži. Rok trajanja zavisi od adekvatnog čuvanja proizvoda.

Hidrogen peroksid gel za izbjeljivanje 38%

CE 93/42:CLASS IIa

1. **Opis:** **Wsmile** gel za izbjeljivanje koristi se za izbjeljivanje zuba sa diskromijom. Gel se aplicira direktno na zube. Koristi se samo za profesionalnu upotrebu.
2. **Sastav:** Hidrogen peroksid 38%, Potasium Nitrat.
3. **Pakovanje i način upotrebe:** Pakovanje sadrži dvije šprice X 2,5ml od 4:1 hidrogen peroksida, jedna šprica 3cc/3,5 gr svjetlosno polimerizirajuće zaštite. Aplikirati maksimalno 20minuta. Kako bi se ubrzalo vrijeme tretmana, može se koristiti LED ili halogena lamp.
4. **Indikacije:** mogu se izbjeljivati područja koja su djelimično ili potpuno zahvaćena diskromijom ili devitalizacijom. Preporučljivo je da se nakon tretmana sačeka bar dvije sedmice prije novih estetskih ispuna. Već postojeće ispune koje nisu zahvaćene gelom za izbjeljivanje možda neće odgovarati novoj boji zuba te će se morati izmjeniti.
5. **Kontraindikacije:** Nemojte koristiti proizvod na trudnicama ili dojiljama, teškim pušačima ili alkoholičarima, pacijentima koji su alergični na bilo koji od ovih komponenata, na zubima sa vidljivim vratnim dijelom, na netretiranom primarnom i sekundarnom karijesu, na krunicama i mostovima sa marginalnim oštećenjima.
6. **Nuspojave:** Može se pojaviti privremena osjetljivost sluznice ili zuba; ovi simptomi obično nestaju nakon prekida tretmana.
7. **Upozorenje:** **Wsmile** sadrži hidrogen koji nadražuje. Koristite zaštitne rukavice, naočale i masku. Proizvod je nadražujući za respiratorni aparat. Izbjegavajte kontakt gela sa kožom, sluznicom i očima. Ukoliko bi došlo do kontakta, zahvaćeno područje isprati vodom; tražiti stručni savjet ako su oči u pitanju. Koristiti samo jednom godišnje. Ukoliko dođe do gutanja veće količine gela, popiti veliku količinu vode i potražiti savjet stručnjaka.
8. **Aplikacija:**

Upustvo za stomatologa: direktna metoda korištenja.

 - Provjeriti da li je površina zuba u potpunosti čista.
 - Zaštititi desni sa gumom ili specijalnim produktom (**Wdam**).
 - Aplikirati proizvod direktno na površinu zuba koristeći kanilu za mješanje.
 - Odstraniti proizvod nakon 10/20min gazom i isprati sa velikom količinom vode.
 - Odstraniti gumu ili produkt za zaštitu desni.
 - Postupak se može ponoviti dok se ne postigne odgovarajuća boja.
 - Smanjiti vremenski period tretmana na pacijentima sa osjetljivim zubima.
 - Provjeriti situaciju zuba i desni nakon tretmana.
9. **Čuvanje:** čuvati na temperaturi od 5°C do 21°C, izbjegavati izlaganje velikim toplotama i direktnom suncu. Držati u frižideru tokom ljetnog perioda. Nakon upotrebe poklopac vratiti na tubu. Ukoliko pravilno postupate proizvod se može koristiti do isteka roka koji je otisnut na ambalaži. Rok trajanja zavisi od adekvatnog čuvanja proizvoda.