

RECIPROC – TF-3 sistem igala za tretman kanala

Uputstvo za korištenje

Opis:

- TF-3 reciproc korijenska igla, jedinstveni dizajn s dvije oštice, poboljšala je sigurnost i životni vijek u kliničkom radu. Konstrukcija reverznog rezanja poboljšala je fleksibilnost i sigurnost instrumenata.

Struktura:

- T20 za tanke korijenske kanale, promjer vrha je ISO 20 #, kontinuirani konus 6%
- T25 za većinu korijenskih kanala, promjer vrha je ISO 25 #, kontinuiran konus 8%, spušta se do krunkog dijela.
- T40 za velike korijenske kanale, promjer vrha je ISO 40 #, kontinuiran konus 8%, spušta se do krunkog dijela.
- Suprotno od kazaljke na satu je 170° , u smjeru kazaljke na satu je 50° .
- Sekcija za rezanje vršnog dijela je poboljšana, srednja ručka je konveksni trokut, s tri žljebova za rezanje,
- te veća površina s korijenskim kanalom.

Redoslijed operacija:

- Prije pripreme potrebno je uzeti rendgenski film za apikalni korijenski kanal, koji može prikazati debeljinu, dužinu, količinu i zakriviljenu situaciju korijenskih kanala. Upotreba K-datoteke pomaže u odabiru odgovarajuće veličine TF-3 na sljedeći način:
- Koristeći datoteku 10 # K u apikalnom korijenskom kanalu, ako biste mogli osjetiti lagani osjećaj trenja, odaberite T20 # prilikom pripreme.
- Koristeći datoteku 10 # K lako se može apikirati u korijenski kanal bez ikakvog trenja, molimo izaberite T25 # prilikom pripreme.
- Koristeći datoteku 20 # K u apikalnom kanalu korijenskog kanala, ako imate neki osjećaj trenja, odaberite T40 # prilikom pripreme.

Konkurentska prednost:

- Klipni sistem za korijenski kanal, jedinstven dizajn dvostrukog ruba, snažno povećava radnu sigurnost i životni vijek.
- Dizajn obrnutog rezanja poboljšava fleksibilnost i sigurnost uređaja.