

PREBOND

Uputstvo za korištenje

PREBOND je ljepilo s izvanrednim adhezijom na dentin i jetkanu caklinu. On poboljšava prijanjanje kompozita na zubnu površinu.

Indikacije:

PREBOND se koristi za poboljšanje prijanjanja kompozita na caklinu i dentin. Dalje, poboljšava prijanjanje između glas-ionomer podloga i kompozitnih ispuna („tehnika sendviča“).

Primjena:

Šupljinu treba pripremiti prema pravilima za tehniku punjenja ljepilom. Ovisno o situaciji, nanosite kalcijum-hidroksid pastu ili podlogu (oblogu) cement u dubokim šupljinama.

Izvrši se jetkanje cakline, ispere i potom suši se u skladu s etch vezom tehnika.

Glass - ionomer cementno punjenje se ne bi trebalo jetkati, već samo ishrapaviti.

Nakon što se pripremljena šupljina osuši, 1-2 kapi svjetlosno-polimerizirajućeg **PREBOND-a** se nakapa na staklo, (***odmah ponovo zatvorite bocu***) i nanosi se tanak sloj na zub pomoću četkice za nanošenje (aplikatora). Višak materijala se uklanja suhom četkicom ili vatarolnom. Zatim se materijal očvršćuje upotrebom lampe (15 sec.)

Nuspojave:

Nuspojave su izuzetno rijetke ako se proizvod priprema i koristi pravilno. Ako biste primjetili neželjene nuspojave, uključujući i slučajeve nedoumice, molimo Vas da nas obavijestite, navodeći precizno opis pratećih okolnosti i simptoma.

Kontraindikacije:

Nemojte koristiti pretpremijeru u području pulpe.

Skladištenje / Rok trajanja:

3 godine čuvajte na hladnom i suvom mestu. Zaštititi od direktnog djelovanja svetlosti!

Pakovanje:

tečnost 1 x 5 ml