

**UPUTSTVO ZA UPOTREBU**  
**RELIGHT Tempo**  
**Svjetlosno polimerizirajući privremeni kompoziti**

**SADRŽI**

Anorganske punioce

**PREDNOSTI**

Kompozitni materijal **ReLight Tempo** je bezbojna ili blago obojena svjetlosno polimerizirajuća pasta, koja se bazira na polimernom vezivanju anorganskih punioca. Materijal zadržava svoju elastičnost nakon polimerizacije i može biti lako uklonjen iz kaviteta pomoću ručnih instrumenata. Materijal sadrži antibakteriska svojstva i omogućava dobro zatvaranje.

**INDIKACIJE**

SP kompozit **ReLight Tempo** se koristi za privremene ispune prilikom endodonskog tretmana, mikroprotetike i privremenog zatvaranja implantnog šarafa.

**KONTRAINDIKACIJE**

Individualno, oprezno nanošenje kod pacijenata sa alergijom na metakrilate.

**NUSPOJAVE**

Ukoliko obratite pažnju na način čuvanja, transporta i aplikaciju, ne postoje nuspojave.

**NAČIN APLIKACIJE**

Pripremljen kavitet mora biti očišćen i osušen prije punjenja. Kako bi izbjegli kontakt između **ReLight Tempo** i lajnera, tretirajte zadnji sa glicerinom. Postavite **ReLight Tempo** u kavitet koristeći instrumente i izmodelirajte željeni oblik. Prije upotrebe **ReLight Tempo** u kavitetu, uklonite kapicu na šprici i postavite u kavitet.

Pažnja! Nemojte ponovo koristiti aplikaciski vrh. Ukoliko koristite materijal prilikom ilneje ili onleje, izolirajte kontaktne tačke pomoću patriksa prije polimerizacije. Materijal se polimerizuje na svjetlosti od 400-500 nm u 20-40 sekundi, u zavisnosti od debljine. Provjerite okluziju, uklonite višak.

Uklonite privremeno punjenje pomoću ručnog instrumenta.

**PAKOVANJE**

Pasta SP bezbojna/plava (šprica) 2.5g

Pasta tečna SP bezbojna/plava (šprica) 2.5g

**ČUVANJE**

Čuvati na suhom i tamnom mjestu na temperaturi od 5 do 25 °C. Dobro zatvoriti nakon upotrebe. Ne koristiti nakon isteka roka. Rok trajanja 3 godine.

**PROIZVOĐAČ**

TehnoDent Co Ltd

1/6 Beryozovaya str., Severnyi Belgorod region, Russia, 308570

*Isključivo za profesionalnu upotrebu*