

NOVA Compo HF - Tečni kompozit

Uputstvo za upotrebu

Nova Compo HF je tečnog stanja svjetlostlosno polimerizirajući kompozit za restorativne primjene. Lako se stvrdnjava uz svjetlost u valnom rasponu duzine od 400-500 (plavo svjetlo)

Oblici:

SASTAV:

Monomer matrica se sastoji od dimetakrilata (30-38%wt) punjenja. Obuhvaća barij stakla, iterbijum trifluorid visokodispenziranog silikonskog dioksida, i prpolimer (70-62%wt). Dodaci katalisti, stabilizatori i pigmenti su kao dodatak sadržaja (1%wt).

PREDNOSTI:

- Visoka izdržljivost, otporan
- Lako rukovanje
- Superioran za estetiku
- Visoko poliranje
- Optimalno tečno stanje jako ugodno za marginalnu adaptaciju
- Pogodan za sve vrste bondova

KONTRAINDIKACIJE:

Ako je pacijent alergičan na bilo koji od sastava ovog proizvoda Nova Compo HF Potražite savjet stručnjaka.

INDIKACIJE:

- Incijalni sloj KLASE *I* do *V*
- Za prednje restoracije (Klase iii, iv.)
- Klasa V restauracije (cervikalni karijes, eroziju korijena, za klinaste defekte).
- Za sve restoracije manjih grupa
- Za udlage mobilnih zuba, i za blokira lomljenje

UPOZORENJE:

- Ukoliko ne polimerizirate Nova Compo HF Ne bi trebalo doći do kontakta sa kožom , sluznice ili očiju. Nova Compo Hf može izazvati efekt osjetila protiv metakrilata a medicinske rukavice vam ne mogu pružiti potpunu zaštitu.

STAVLJANJE NOVA COMPO HF:

- Odaberite boju
- Pružite prikladnu izolaciju, najbolje sa gumicom.
- Pripremite šupljinu prepa stručnim zahtjevima za adhesivnu tehniku
- Očistite šupljinu vodom sa sprejom
- Osušite šupljinu
- Ne stavljajte bazni materijal kada je u pitanju enamel ili sredstvo za dentin kao npr bond ili sl.
- Selektivno prekrijte veoma duboka područja i zatvorite pulpu sa kalcij hidroksidom i postepeno koristite glass ionomer cement. Ne prekrivati zidove šupljine.
- Stavite matricu Preporučujemo kada stavljate bond da koristite fosforu kiselinu za bolju vezu sa bondom.
- Aplikirajte Nova Compo HF u tankom sloju maksimalno 1,5-2mm i polimerizirajte svaki sloj 20 sekundi. Držite svjetlost sa propisom koliko je duže moguće što je navedeno to je bolje za površinu restorativnih materijala.
- Kada koristite metalnu matricu dodatno polimerizirajte od usta ili jezika/palatalnog dijela nakon otklanjanja matrice.
- Završite restauraciju sa prikladnim završivačima ili finišeima.
- Provjerite začepljenje
- Polirajte sa silikonskim polirima.

ČUVANJE:

- Čuvati na temperaturi od 2-28°C/36-82°F
- Zatvorite odmah šprice nakon upotrebe.
- Čuvati lijek van dohvata djece.