

PANORA 200

Uputstvo za upotrebu

Panora 200 kiselina koja se koristi za jetkanje, u slijedećim slučajevima:

Kompozitne restauracije, cementiranje inlay-a, onlay-a, krunica, mostova, lijepljenje ortodontskih bravica, zaljevanje fisura.

Panora 200 se primjenjuje na gleđ a potom i na dentin, i dozvoljeno reakcijsko vrijeme je 15 sekundi. Nakon toga vodom isprati a potom osušiti površinu sa zrakom. Izbjegavati sušenje dentina.

Nakon toga zubna gleđ trebala bi imati kredasto bijelu boju. U slučaju da nije tako postupak ponoviti ali koristiti kraći vremenski period. Ako površina zuba slučajno postane kontaminirana pljuvačkom ponoviti proces jetkanja u maksimalnom trajanju od 10 sekundi.

Sastav:

Panora 200 sadrži 37% fosfornu kiselinu, gel i boju

Čuvanje

- Panora 200 čuvati na temp od 4 do 25
- Preporuka: veću količinu držati u frizideru na temperaturi od 2 do 8 °C
- Čuvati van dohvata djece
- Koristiti samo za stomatološku upotrebu
- Proizvod ne koristiti nakon isteka roka trajanja