



IMIDENT TEČNOST

Uputstvo za upotrebu
Za IMIDENT privremene krunice i mostove
UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Definicija

TIP II, KLASA I privremene krunice i mostovi, samostvrđnjavajuća akrilna tečnost. Sastoji se od komponente u prahu i tečne komponente, koja može biti u raznim bojama.

Kompozicija

Tečnost monomera metil metakrilata

Područje primjene

Privremene krunice i mostovi

Aplikacija

Polimerizacija se odvija sama od sebe na normalnoj sobnoj temperaturi. Treba ga uzimati u količini od 10 ml/24 g (w/w) i uzimati 1 min. Mešanje treba obaviti u suvoj staklenoj ili porcelanskoj posudi.

U sobnim uslovima postaje testo za 10 minuta.

Radno vrijeme je 30 minuta.

Nakon što je posao završen, poklopce treba zatvoriti.

Kontraindikacije

IMIDENT Temporary Crown And Bridge Acrylic ne treba koristiti u slučaju dokazane alergije na njegovu komponentu.

Skladištenje

Čuvati na suvim, tamnim i hladnim mestima sa dobrom ventilacijom. Ne koristiti proizvod nakon isteka roka upotrebe.

Zatvorite poklopac proizvoda odmah nakon upotrebe.

Nuspojave

Sistemske nuspojave do danas nisu poznate

Interakcije

Sistemske interakcije do danas nisu poznate

Upozorenja i mjere opreza

Čuvati izvan dohvata djece! Samo za upotrebu u stomatologiji!

Tečni dijelovi seta proizvoda su zapaljivi, mogu izazvati iritaciju (iritaciju) očiju i kože i mogu uzrokovati probleme u respiratornom sistemu.

Toksičan je za vodu. Ne dozvoliti da se razrijeđeni proizvod ispusti u kanalizaciju.

Metoda odlaganja

Njegovo odlaganje se vrši u skladu sa propisima nadležnih organa i predaje se ovlašćenom preduzeću za sakupljanje opasnog otpada, pod uslovima odobrenim od strane lokalne samouprave.

Polovna ambalaža

Njegovo odlaganje se vrši u skladu sa propisima nadležnih organa.

Za akrilnu tečnost; Proizvod sadrži metil metakrilat, zapaljiv je. Može iritirati kožu i respiratorni sistem. Kontakt sa kožom može izazvati preosjetljivost. Proizvod čuvajte na mestima sa dobrim ventilacionim sistemom. Držati dalje od vatre. Ne pušite. Izbjegavati kontakt sa kožom. Nosite odgovarajuće rukavice. Ako izazove požar, koristite pijesak, ugljični dioksid ili aparat za gašenje požara. Nikada nemojte koristiti vodu za gašenje požara.

Udisanje: Izađite na svež vazduh, obratite se lekaru u slučaju tegoba.

Kontakt sa kožom: Odmah oprati sa puno sapuna i vode.

Dodir sa očima: Oči treba isprati sa dosta vode i konsultovati lekara.

Ako se proguta: Ne izazivati povraćanje, obratiti se najbližoj bolnici ili zdravstvenoj ustanovi.

Ova supstanca je razvijena samo za stomatološku upotrebu. U praksi se moraju poštovati uputstva za upotrebu. Ne preuzimamo odgovornost u slučajevima kada se ne poštuje navedeno područje upotrebe i uputstva za upotrebu. Korisnik je odgovoran za rezultate upotrebe i ispitivanja osim onih navedenih u uputama. Identifikacija i informacije ne predstavljaju garanciju, niti su obavezujuće.

Datum isteka 3 godine od datuma proizvodnje.

Rok proizvodnje i rok trajanja su na bocama ili limenkama.

Datum pripreme korisničkog priručnika:

Rev 01 03.07.2020. TD-01-IFU-18 Ref. br. 0454



IMIDENT PUDER

Uputstvo za upotrebu

Za IMIDENT privremene krunice i mostove

Definicija

TIP II, KLASA I, samostvrđnjavajući akrilni prah za privremene krunice i mostove. Dostupne su različite skale boja. A0,A1,A2,A3,A4

Kompozicija

Polimetil metakrilat u prahu

IMIDENT praškasti proizvodi ne sadrže kadmijum.

Područje primjene

Privremene krunice i mostovi

Aplikacija

Polimerizacija se odvija sama od sebe na normalnoj sobnoj temperaturi, uzima se u omjeru 10 ml/24 g (w/w) i čeka 1 min.

Mešanje treba obaviti u suvoj staklenoj ili porcelanskoj posudi.

U sobnim uslovima postaje testo za 10 minuta.

Radno vrijeme je 30 minuta.

Nakon što je posao završen, poklopce treba zatvoriti.

Kontraindikacije

Ne treba se koristiti u slučaju dokazane alergije na komponentu IMIDENT Temporary Crown and Bridge Acrylic praha.

Skladištenje

Čuvati na suvim, tamnim i hladnim mestima sa dobrom ventilacijom. Ne koristiti proizvod nakon isteka roka upotrebe.

Zatvorite poklopac proizvoda odmah nakon upotrebe.

Nuspojave

Sistemske nuspojave do danas nisu poznate

Interakcije

Sistemske interakcije do danas nisu poznate

Upozorenja i mjere opreza

Čuvati izvan dohvata djece! Samo za upotrebu u stomatologiji!

Tečni dijelovi seta proizvoda su zapaljivi, mogu izazvati iritaciju (iritaciju) očiju i kože i mogu uzrokovati probleme u respiratornom sistemu.

Toksičan je za vodu. Ne dozvoliti da se razrijeđeni proizvod ispusti u kanalizaciju.

Metoda odlaganja

Njegovo odlaganje se vrši u skladu sa propisima nadležnih organa i predaje se ovlašćenom preduzeću za sakupljanje opasnog otpada, pod uslovima odobrenim od strane lokalne samouprave.

Polovna ambalaža

Njegovo odlaganje se vrši u skladu sa propisima nadležnih organa.

Za akrilnu tečnost; Proizvod sadrži metil metakrilat, zapaljiv je. Može iritirati kožu i respiratorni sistem. Kontakt s kožom može izazvati preosjetljivost. Čuvati proizvod u dobro prozračenom prostoru. Čuvati dalje od vatre. Ne pušiti. Izbjegavati kontakt s kožom. rukavice ili koristite aparat za gašenje požara. Nikada nemojte koristiti vodu za gašenje požara.

Udisanje: Izađite na svež vazduh, obratite se lekaru u slučaju tegoba.

Kontakt sa kožom: Odmah oprati sa puno sapuna i vode.

Dodir sa očima: Oči treba isprati sa dosta vode i konsultovati lekara.

Ako se proguta: Ne izazivati povraćanje, obratiti se najbližoj bolnici ili zdravstvenoj ustanovi.

Ova supstanca je razvijena samo za stomatološku upotrebu. U praksi se moraju poštovati uputstva za upotrebu. Ne preuzimamo odgovornost u slučajevima kada se ne poštuje navedeno područje upotrebe i uputstva za upotrebu. Korisnik je odgovoran za rezultate upotrebe i ispitivanja osim onih navedenih u uputama. Identifikacija i informacije ne predstavljaju garanciju, niti su obavezujuće.

Datum isteka 3 godine od datuma proizvodnje.

Rok proizvodnje i rok trajanja su na bocama ili limenkama.

Datum pripreme korisničkog priručnika:

Rev 01 03.07.2020. TD-01-IFU-11 Ref No: 0201