

OCCLU SPREJ

Uputstvo za upotrebu

Indikacije:

V-Occlu sprej je svestrani indikator boje u obliku mikroniziranog praha koji se koristi za označavanje zubnih mjesta i kontaktnih površina. Korisno prilikom provjere krunica i mostova. Lako se nanosi stvaranjem tankog sloja na površinama. Ispiranje vodom bez mrljanja.

Način korišćenja:

Prije upotrebe promućkati. Nanesite tanak sloj proizvoda na označenu površinu sa udaljenosti od 2-5 cm.

Kontraindikacije:

Ne koristiti nakon isteka roka trajanja.

Mjere predostrožnosti:

Nositi zaštitne rukavice/zaštitnu odjeću/zaštitu za oči/zaštitu za lice.

Uslovi skladištenja:

Čuvati na suvom mestu, u originalnom pakovanju dobro zatvorenom, na temperaturi ne višoj od 50°C/122°F.

Uslovi transporta:

Nemojte prekoračiti temperaturu od 50°C/122°F tokom transporta.

Datum isteka:

Rok upotrebe je odštampan na direktnom pakovanju.

Rukovanje i skladištenje ambalaže:

Prazno pakovanje reciklirajte prema važećim odredbama.

Sastav:

Standardna boja u prahu.

Neposredno pakovanje:

Aluminijumska konzerva od 120 ml.

ČUVATI VAN DOMAŠAJA DJECE!