

RASTVOR LIMUNSKKE KISELINE 40%

Uputstvo za upotrebu

Indikacije:

PROIZVOD NAMENJEN UPOTREBI ISKLJUČIVO OD STRANE STOMATOLOGA!

Proizvod se koristi za ispiranje korijenskih kanala. Čisti korijenski kanal, uključujući uklanjanje razmaznog sloja, kako bi se otkrio otvor tubule dentina prije punjenja kanala korijena. Proizvod sadrži limunsku kiselinu, koja dobro otapa uglavnom mineralni dio razmaznog sloja.

Način korišćenja:

Uneti 40% limunske kiseline na 2/3 dužine kanala korena pomoću šprica sa iglom. Uvesti preparat u kanal pomoću šprica (npr. luer-lock tipa) sa iglom pričvršćenom na način koji osigurava njegovo odvajanje.

Ispirite sa 35 ml proizvoda nakon svakog mehaničkog proširenja kanala, najbolje naizmjenično s drugim proizvodima namijenjenim za ispiranje kanala. Nakon ispiranja kanala, aspirirajte tečnost i njen sadržaj. Nakon ispiranja korijenskog kanala, višak količine u špricu treba baciti – nikada ne sipajte natrag u posudu.

Kontraindikacije:

Ne koristiti kod pacijenata sa preosjetljivošću na komponente proizvoda. Ne koristiti kod trudnica. Ne koristiti nakon isteka roka trajanja. Ne koristiti ako je pakovanje oštećeno.

Mjere predostrožnosti:

Nemojte koristiti natrijum hipohlorit odmah nakon ispiranja limunskom kiselinom ili obrnuto. To može dovesti do evolucije hlora. Između upotrebe ova dva sredstva, ispirite kanal pročišćenom vodom ili rastvorom H₂O₂.

Prilikom ispiranja kanala korijena nemojte koristiti prejak mlaz tekućine, jer to može dovesti do dospijeća proizvoda u periapikalna tkiva i izazvati njihovu iritaciju koja se manifestuje bolom i oticanjem mekih tkiva. Nemojte koristiti proizvod u slučaju preosjetljivosti na njegove komponente. Prilikom rada sa proizvodom treba koristiti koferdam. Uzrokuje ozbiljna oštećenja oka. Nosite zaštitne rukavice, zaštitnu odjeću, zaštitu za oči, zaštitu za lice. U slučaju kontakta sa očima: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Uklonite kontaktna sočiva, ako postoje i ako ih je lako učiniti. Nastavite sa ispiranjem. Odmah pozovite CENTAR ZA TROVANJE ili ljekara.

Nemojte koristiti ako sumnjate da je došlo do oštećenja neposrednog pakovanja.

Nakon otvaranja pakovanja, rok trajanja se ne mijenja ako se nakon svake upotrebe zatvori.

Tokom upotrebe moguće je da supstanca kristalizuje u rastvoru i oko čepa – to ne umanjuje efikasnost i bezbednost proizvoda.

Uslovi skladištenja:

Čuvati u dobro zatvorenoj posudi, na temperaturi do 25°C. Zaštitite od sunčeve svjetlosti.

Uslovi transporta:

Tokom transporta proizvod se može ohladiti na -5°C, ali ne duže od 7 dana. Ne prelaziti +40°C.

Rok važenja:

Rok trajanja se može naći na direktnom pakovanju.

Rukovanje ambalažom nakon proizvoda:

Iskorišćenu ambalažu treba odložiti u skladu sa važećim propisima.

Sastav:

Limunska kiselina, prečišćena voda.

Direktno pakovanje:

PET boca koja sadrži 200 g proizvoda.

**ČVRSTO ZATVORITE NAKON SVAKE UPOTREBE
ČUVATI VAN DJECE**