

# SC PRAŠAK

## Uputstvo za upotrebu



Akril za popravku hladnog očvršćavanja

### Definicija

TIP II, KLASA I se samostvrdnjavajuća, samoočvršćavajuća akrilna tečnost za popravku i korekciju proteza.

### Kompozicija

Monomer metil metakrilata.

### Područje primjene

Koristi se za popravku i korekciju proteza.

### Kontraindikacije

SC se ne smije koristiti u prisustvu dokazane alergije na jednu ili više njegovih komponenti na Cold Cure Repair Acrylic.

### Aplikacija

Mešanje praha i tečnosti vršiti u suvoj staklenoj ili porcelanskoj posudi. Preporučeni odnos mešanja je 24 g praha: 10 g tečnosti. U tečnost dodati prah, sačekati 1 minut, a zatim mešati 1 minut sa pomoc lopatice. Testo s vremena na vreme proveriti i prestati da se lepi za ruke. vreme treba podesiti. Na sobnoj temperaturi vreme rada je cca 30 minuta.

### Skladištenje

Čuvati na suvim, tamnim, hladnim i dobro provetrenim mestima.

Nemojte koristiti proizvod nakon isteka roka valjanosti.

Zatvorite poklopac proizvoda odmah nakon upotrebe.

### Upozorenja i mjere opreza

Čuvati izvan dohvata djece!

Samo za upotrebu u stomatologiji!

Tečni dijelovi seta proizvoda su zapaljivi, mogu izazvati iritaciju (iritaciju) očiju i kože i mogu uzrokovati probleme u respiratornom sistemu.

Toksičan je za vodu. Ne dozvoliti da se razblaženi proizvod ispusti u kanalizaciju.

Za akrilnu tečnost; Proizvod sadrži metil metakrilat, zapaljiv je. Može iritirati kožu i respiratorni sistem. Kontakt s kožom može izazvati preosjetljivost. Čuvati proizvod u dobro prozračenom prostoru. Čuvati dalje od vatre. Ne pušiti. Izbjegavati kontakt s kožom. rukavice ili koristite aparat za gašenje. Nikada nemojte koristiti vodu za gašenje požara.

Udisanje: Izadite na svež vazduh, obratite se lekaru u slučaju tegoba.

Kontakt sa kožom: Odmah oprati sa puno sapuna i vode.

Dodir sa očima: Oči treba isprati sa dosta vode i konsultovati lekara.

Ako se proguta: Ne izazivati povraćanje, obratiti se najbližoj bolnici ili zdravstvenoj ustanovi.

Ovaj proizvod je razvijen samo za upotrebu u stomatologiji. U praksi se moraju poštovati uputstva za upotrebu. U slučajevima kada se ne poštuje navedeno područje upotrebe i uputstva za upotrebu, ne preuzimamo odgovornost. Opisi i informacije ne predstavljaju garanciju, niti su obavezujuće.

Ne koristiti nakon isteka roka trajanja

Nakon upotrebe poklopac treba dobro zatvoriti.

Datum isteka 3 godine od datuma proizvodnje.

Rok proizvodnje i rok trajanja su na bocama ili limenkama.

Datum štampanja: 22.10.2019

Priprema Datum upotrebe Informacije: Rev 01 03.07.2020 TD-01-IFU-17 Ref. No:0402-0403-0404



## SC TEČNOST

### Uputstvo za upotrebu

Akril za popravku hladnog očvršćavanja

#### **Definicija:**

TIP II, KLASA I se samostvrdnjavajuća, samoočvršćavajuća akrilna tečnost za popravku i korekciju proteza.

#### **Kompozicija**

Monomer metil metakrilata.

#### **Područje primjene**

Koristi se za popravku i korekciju proteza.

#### **Kontraindikacije**

SC ne treba koristiti u slučajevima dokazane alergije na jednu ili više njegovih komponenti na l Cold-Setting Repair Acrylic.

#### **Aplikacija**

Mešanje praha i tečnosti vršiti u suvoj staklenoj ili porcelanskoj posudi Preporučeni odnos mešanja je 24 g praha: 10 g tečnosti. U tečnost treba dodati prah, a nakon čekanja 1 minut, mešati ga 1 minut uz pomoć lopatice. Testo treba s vremena na vreme proveravati, a kada prestane da se lepi za ruke, treba da se uradi udarac. Na sobnoj temperaturi vreme rada je oko 30 minuta.

#### **Skladištenje**

Čuvati na suvim, tamnim, hladnim i dobro provetrenim mestima.

Nemojte koristiti proizvod nakon isteka roka valjanosti.

Zatvorite poklopac proizvoda odmah nakon upotrebe.

#### **Upozorenja i mjere opreza**

Čuvati izvan dohvata djece!

Samo za upotrebu u stomatologiji!

Tečni dijelovi seta proizvoda su zapaljivi, mogu izazvati iritaciju (iritaciju) očiju i kože i mogu uzrokovati probleme u respiratornom sistemu.

Toksičan je za vodu. Ne dozvoliti da se razrijeđeni proizvod ispusti u kanalizaciju.

Za akrilnu tečnost; Proizvod sadrži metil metakrilat, zapaljiv je. Može iritirati kožu i respiratorni sistem. Kontakt s kožom može izazvati preosjetljivost. Čuvati proizvod u dobro prozračenom prostoru. Čuvati dalje od vatre. Ne pušiti. Izbjegavati kontakt s kožom. rukavice ili koristite aparat za gašenje požara. Nikada nemojte koristiti vodu za gašenje požara.

Udisanje: Izađite na svež vazduh, obratite se lekaru u slučaju tegoba.

Kontakt sa kožom: Odmah oprati sa puno sapuna i vode.

Dodir sa očima: Oči treba isprati sa dosta vode i konsultovati lekara.

Ako se proguta: Ne izazivati povraćanje, obratiti se najbližoj bolnici ili zdravstvenoj ustanovi.

Ova supstanca je razvijena samo za stomatološku upotrebu. U praksi se moraju poštovati uputstva za upotrebu. Ne preuzimamo odgovornost u slučajevima kada se ne poštuje navedeno područje upotrebe i uputstva za upotrebu. Korisnik je odgovoran za rezultate upotrebe i ispitivanja osim onih navedenih u uputama. Opisi i informacije ne predstavljaju garanciju, niti su obavezujuće.

Ne koristiti nakon isteka roka trajanja

Nakon upotrebe poklopac treba dobro zatvoriti.

Datum isteka 3 godine od datuma proizvodnje.

Rok proizvodnje i rok trajanja su na bocama ili limenkama.

Datum štampanja: 22.10.2019 Priprema Datum upotrebe Informacije i: Rev 01 03.07.2020 TD-01-IFU-17

Ref.br.:0402-0403-0404