

V-ALGIN – alginate Uputstvo za upotrebu

Tip I: Brzo lijepljenje zadovoljava ISO 1563 specifikacije.

Iako se može koristiti voda iz mreže, deklarirana vremena mjerena su miješanjem praha s dejoniziranom vodom na 23°C. Puder snažno pomiješajte sa vodom.

Kada koristite posebne mehaničke miksera za materijale za otiske na bazi alginata, slijedite upute proizvođača. Slijedite indikacije kromatske faze koje osiguravaju da se proizvod savršeno izmiješa i unese u usta u pravom trenutku. Varijacije u temperaturi i/ili tvrdoći vode i brzini i/ili trenju tokom miješanja uzrokuju male promjene u radnom vremenu i vremenu početnog stvrdnjavanja, koje su automatski naznačene promjenama boje. Smanjenje količine vode smanjuje vrijeme stvrdnjavanja.

Operite, isperite i protresite otisak i prelijte model.

Model se takođe može sipati u roku od 168 sati uz odlične rezultate.

Otisak se mora čuvati u zatvorenoj plastičnoj vrećici bez dodavanja bilo čega drugog.

Odlični rezultati se mogu postići sa V-DENTAL flasterima:

Tip 3: A-III plavi zubni gips, A-III žuti zubni gips,

Tip 4: A-IV Stone Dental Gypsum.

Ne ostavljajte otisak izložen vazduhu ili uronjen u vodu. Čuvajte posudu dobro zatvorenu na hladnom i suvom mestu.

V-Algin ne zahtijeva poseban tretman prije upotrebe.

Promjena boje otiska u ljubičastu i pojava ljubičastih tačaka tokom skladištenja ne mijenja svojstva otiska.

Materijal bez prašine – ISO 21563

Ipak, savjetuje se oprez prilikom otvaranja vrećice i vađenja praha.

Klasa A Tip I alginat BRZO

Neto težina: 450 g

Neto zapremina nakon mešanja: 1250 ml

SAMO ZA MEDICINSKU UPOTREBU!

NE SADRŽI OLOVO ILI DRUGE TEŠKE METALE!