

PROCEM

Uputstvo za korištenje

Procem je cement bez eugenola, jednostavan za upotrebu. Preporučuje se za korištenje kod osoba sa alergijom na eugenol. Kako bi podržao vitalnost zuba Procem sadrži kalcium hidroksid i hidrokilapatit.

Namjena:

Procem se koristi kao privremeni cement za fiksiranje nadoknada.

Način upotrebe:

Procem bi se trebao koristiti na sobnoj temperaturi. Baza i katalizator se miješaju u odnosu 2:1 v/v.

Za taj omjer, istisnite dužinu katalizator paste i u odnosu na nju, istisnite dvostruku dužinu baze na podlugu koja ne upija ili staklenu pločicu. Zatim miješajte te dvije paste oko 30 sekundi dok materijal ne dostigne homogenu konzistenciju. Koristite plastičnu špatulu.

Aplicirajte tanki sloj unutar privremene krune ili mosta i postavite na pripremljeni zub. Radno vrijeme je oko 1-2minute, vrijeme vezivanja u ustima 3-6minuta. 3-5minuta nakon vezivanja uklonite višak.

Dopunske indikacije:

Kako bi materijal ostao mekši, što omogućava duže radno vrijeme, dodati malo više baze. Brže vezivanje se ostvaruje dodavanjem više katalizatora li cink oksida.

Kontraindikacije:

Ukoliko se postupa po uputama korištenja, skladištenja i transporta, nema kontraindikacija.

Čuvanje:

Procem čuvati na sobnoj temperaturi.
Zatvoriti bočice nakon korištenja.