



## **MEDICINSKO SREDSTVO SAMO ZA PROFESIONALNU STOMATOLOŠKU UPOTREBU**

### **Namjeravanu upotrebu**

Tečnost za kontrolu perigingivalnog krvarenja koje je rezultat intraoralnih procedura. Pomaže kod povlačenja gingive. Ne uzrokuje promjene boje i sedimente.

Može se koristiti direktno za kontrolu krvarenja ili u kombinaciji sa gingivalnim retrakcionim kablom.

### **Tehnički i medicinski podaci**

Sastav: aluminijum hlorid heksahidrat, esencija mente, prečišćena voda, kinosol (konzervans), natrijum hidroksid.

1 g proizvoda sadrži 0,2 g aluminij hlorid heksahidrata.

Primarno pakovanje: plastična boca sa poklopcem sa kapaljkom koja sadrži 10 g proizvoda.

### **Mehanizam djelovanja**

Alustin® nanesen na područje krvarenja stvara površinski zaštitni sloj. Krvarenje prestaje nakon nekoliko minuta, što omogućava jednokratni tretman bez potrebe za privremenim previjanjem.

### **Upute za upotrebu:**

#### **Tokom kontrole krvarenja:**

1. Sprečite krvarenje pomoću pamučne jastučice natopljene Alustinom®.
2. Nakon zaustavljanja krvarenja, isperite tkiva pročišćenom vodom ili zrakom i protokom vode.
3. U slučaju krvarenja ponoviti postupak.

#### **Tokom povlačenja:**

1. Impregnirajte retrakcioni kabl sa Alustinom®.
2. Stavite retrakcioni kabl u gingivalni džep na 4 do 5 minuta.
3. Uklonite retrakcionu vrpču i temeljito isperite gingivalni džep zrakom i protokom vode ili pročišćenom vodom, osušite strujom zraka.
4. U slučaju krvarenja ponoviti postupak.
5. Ostavite utisak.

### **Upozorenja, mjere opreza i kontraindikacije**

- ✎ Nanošenje proizvoda ne bi trebalo da traje duže od 5 minuta.
- ✎ Kombinacija fosfata ili alkalnih supstanci sa proizvodom može uzrokovati koagulaciju (pojavice se privremena tamna promjena boje na tretiranom području).
- ✎ Ne koristiti kod akutnog gingivitisa i parodontitisa ili akutnog nekrotizirajućeg ulceroznog gingivitisa.
- ✎ Nemojte koristiti proizvod u slučaju preosjetljivosti na bilo koji od sastojaka.

### **Izaziva iritaciju kože. Izaziva ozbiljnu iritaciju oka.**



Nositi zaštitne rukavice/zaštitnu odjeću/zaštitu za oči/zaštitu za lice.


**AKO DOSPE NA KOŽU:** Oprati sa dosta vode/sapuna.

**AKO DOSPE U OČI:** Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Uklonite kontaktne leće, ako postoje i ako ih je lako učiniti. Nastavite sa ispiranjem.

Odložiti sadržaj/kontejner u skladu sa zahtjevima korištenja.

### **Mesto i uslovi skladištenja**

Držite posudu dobro zatvorenu. **Čuvati van domašaja djece.**

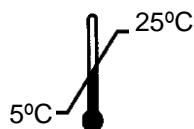

**Čuvati na temperaturi od 5°C do 25°C.**



**Broj serije je dat na vanjskom i primarnom pakovanju.**



**Rok trajanja je naveden na vanjskom i primarnom pakovanju. Ne koristiti nakon isteka roka trajanja. Nakon otvaranja, rok trajanja se ne mijenja pod uslovom da je ambalaža dobro zatvorena nakon svake upotrebe.**



**Proizvođač**

CHEMA-ELEKTROMET

Spółdzielnia Pracyul. Przemysłowa 9

35-105 Rzeszów, Polska [www.chema.rzeszow.pl](http://www.chema.rzeszow.pl)

[chema@chema.rzeszow.pl](mailto:chema@chema.rzeszow.pl)



### **Objašnjenje:**

✎ - važna uputstva

✎ - obratite posebnu pažnju na tekstove označene ovim simbolom

