

CANAL-DRY
Tečnost za sušenje i odmaščivanje zubnog tkiva
Uputstvo za upotrebu
Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo



MEDICINSKI UREĐAJ SAMO ZA PROFESIONALNU STOMATOLOŠKU UPOTREBU

Namjena

Preparat za sušenje i odmaščivanje korijenskih kanala, karijesa prije punjenja ili panjeva prije fiksiranja trajnih protetskih nadomjestaka.

Tehnički i medicinski podaci

Sastav: aceton, etil acetat, izopropil alkohol.

Primarno pakovanje: smeđa staklena boca sa plastičnim poklopcem i kapaljkom, koja sadrži 45 ml proizvoda.

Mehanizam djelovanja





Zahvaljujući odgovarajućim sastojcima Canal-Dry uklanja masnoće i ostatke vlage sa tvrdih tkiva zuba. Poboljšava adheziju ispuna i protetskih nadomjestaka.

Izopropil alkohol, jedan od sastojaka, je higroskopna supstanca koja brzo suši zubno tkivo. Takođe smanjuje površinsku napetost. Ostale komponente preparata, aceton i etil acetat, odmaščuju površinu zuba. Svi primijenjeni sastojci su tvari koje kratko isparavaju, tako da se potrebno sušenje i odmaščivanje zuba postiže u roku od nekoliko ili nekoliko sekundi.

Uputstvo za upotrebu

Preparat nanijeti natopljenim pamučnim štapićem na očišćeni kavitet ili zubni panj. Ostavite nekoliko ili nekoliko sekundi da se osuši, nemojte sušiti špricom za zrak. Ako je potrebno, osušite papirnim vrhom kako biste uklonili preostalu tečnost.

Upozorenja, mjere opreza i kontraindikacije

-  Nemojte koristiti proizvod u slučaju preosjetljivosti na sastojke proizvoda.
-  Nemojte koristiti proizvod kao tečnost za navodnjavanje.
-  Kada se koristi u korijenskom kanalu, tako da tekućina ne uđe u apikalni.
-  Preporučljivo je koristiti koferdam tokom nanošenja proizvoda. Koristite zaštitne mere (naočare, rukavice). Izbjegavati kontakt sa očima, mekim tkivima usne duplje i kožom.



Lako zapaljiva tečnost i para.
Izaziva ozbiljnu iritaciju oka.
Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu.


Nosite zaštitne rukavice, zaštitnu odjeću, zaštitu za oči, zaštitu za lice.

AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Uklonite kontaktna sočiva, ako postoje i ako ih je lako učiniti. U slučaju trajne iritacije oči: Potražite liječnički savjet/pomoć.

AKO SE UDIŠE: Izneti žrtvu na svjež vazduh i ostaviti da miruje u položaju udobnom za disanje.

Ponovljeno izlaganje može izazvati suvoću ili pucanje kože.

Odložiti sadržaj/kontejner u skladu sa zahtjevima korištenja.

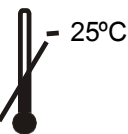


Mjesto i uslovi skladištenja

Držite posudu dobro zatvorenu. Čuvati van domašaja djece. Čuvati dalje od vrućine, varnica, otvorenog plamena, vrućih površina.

Čuvati na temperaturi ispod 25°C.

Čuvati dalje od sunčeve svjetlosti.

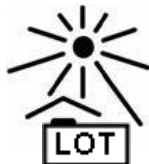

Broj serije je dat na vanjskom i primarnom pakovanju.



Rok trajanja je naveden na vanjskom i primarnom pakovanju. Nemojte koristiti proizvod nakon isteka roka valjanosti. Nakon otvaranja rok trajanja se ne mijenja pod uslovom da je ambalaža dobro zatvorena nakon svake upotrebe.



Svaki ozbiljan incident u vezi sa proizvodom treba prijaviti proizvođaču i odgovarajućoj agenciji.



Proizvođač:

CHEMA-ELEKTROMET

Spółdzielnia Pracy

ul. Przemysłowa 9


35-105 Rzeszów

Poland www.chema.rzeszow.pl

chema@chema.rzeszow.pl



Objašnjenje

 - obratite posebnu pažnju na tekstove označene ovim simbolom

Provjereno: 2022-01

