

**Uputstvo za upotrebu***Prije upotrebe pažljivo pročitajte upute***MEDICINSKO SREDSTVO SAMO ZA PROFESIONALNU STOMATOLOŠKU UPOTREBU****Namjeravanu upotrebu**

Proizvod za hemijsku pripremu kanala korena.

Posebno je koristan tokom reendodontskog tretmana korijenskog kanala; proizvod olakšava razvrtanje i instrumentaciju uskih kanala. Pokazuje svojstva podmazivanja koja pojednostavljuju klizanje turpije i pripremu kanala, nanošenje u kanal je lako i dobro prodire. Smanjuje rizik od loma alata unutar kanala.

Indikacije:

- ekspozicija otvora,
- hemijsko razvrtanje i postizanje prohodnosti,
- uklanjanje intrakanalnog razmaznog sloja,
- postizanje prohodnosti u slučaju intrakanalnog dentinoma.

Tehnički i medicinski podaci

Sastav: dinatrijum edetat (EDTA), benzalkonijum bromid, natrijum hidroksid, HEC, polioksietilen-polioksipropilen glikol, E 131, prečišćena voda.
1 g gela sadrži 150 mg dinatrijum edetata.

Pakovanje:

Špric sa zaštitnim poklopcem koji sadrži 5,5 g gela.

Karakterizacija proizvoda

Preparat sadrži dinatrijum edetat, koji reaguje sa neorganskim ostacima razmaznog sloja (helatni efekat) i olakšava prodiranje instrumenata. Štaviše, Endogel® pokazuje svojstva podmazivanja zbog svoje teksture. Boja proizvoda čini ga vidljivijim u pulpnoj komori.

Uputstvo za upotrebu

1. Skinite zaštitni poklopac sa šprica i pričvrstite vrh za jednokratnu upotrebu (tupa jednokratna igla).
2. Koristeći vrh za jednokratnu upotrebu, nanesite malu količinu proizvoda u pulpnu komoru ili direktno na instrument, a zatim pokrenite instrumentaciju.
3. Tokom instrumentacije kanal isperite rastvorom natrijum hipohlorita (npr. Chloran, Chloran Plus) ili EDTA (npr. **Endosal®**, **Endoxal®**).
4. Nakon nanošenja proizvoda uklonite jedan vrh, a zatim lagano premotajte klip da biste uklonili gel sa vrha. Zatvorite špric zaštitnim poklopcem.

Upozorenja, mjere opreza i kontraindikacije


- ☞ Obratite posebnu pažnju na temeljito ispiranje proizvoda iz kanala, jer ako to ne učinite, može doći do pretjeranog „omekšavanja“ i promjene boje dentina.
- ☞ Pretjerano **“omekšavanje”** dentina, posebno blizu apeksa, može dovesti do perforacije. Često se dešava kada se koriste turpije ISO 30 ili veće, koje nisu tako fleksibilne kao one tanje i sa omekšanim dentinom mogu uzrokovati perforaciju.
- ☞ Tokom ispiranja proizvoda treba se pridržavati mjera opreza prikladnih za rješenja za navodnjavanje.
- ☞ Nemojte koristiti proizvod u slučaju preosjetljivosti na sastojke proizvoda.
- ☞ Zapamtite da određena doza Endogela® vezuje ograničenu količinu jona kalcijuma. Stoga, gel koji se unosi u kanal treba često mijenjati, kako bi se održao helirajući efekat.
- ☞ Obratite posebnu pažnju na precizno fiksiranje vrha za jednokratnu upotrebu. Prilikom nanošenja nemojte pretjerano pritiskati klip šprica jer to može uzrokovati nekontrolisano odvajanje vrha.

Mesto i uslovi skladištenjaDržite posudu dobro zatvorenu. **Čuvati van domašaja djece.****Nadražuje kožu. Nadražuje oči.**

Nositi zaštitne rukavice/zaštitnu odjeću/zaštitu za oči/zaštitu za lice.

AKO DOSPE NA KOŽU: Temeljito oprati sa puno sapuna i vode.**AKO DOSPE U OČI:** Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Uklonite kontaktne leće, ako postoje i ako ih je lako učiniti. Nastavite sa ispiranjem.

Odložiti sadržaj/kontejner u skladu sa zahtjevima korištenja.

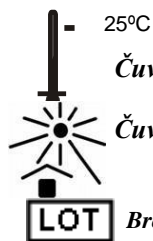

Čuvati na temperaturi ispod 25°C.

Čuvati dalje od sunčeve svjetlosti.

Broj serije je dat na vanjskom i primarnom pakovanju.



Rok trajanja je naveden na vanjskom i primarnom pakovanju. Ne koristiti nakon isteka roka trajanja. Nakon otvaranja rok trajanja se ne mijenja pod uslovom da je ambalaža dobro zatvorena nakon svake upotrebe.

- ☞ Svaki ozbiljan incident vezan za proizvod treba prijaviti proizvođaču i odgovarajućoj agenciji (predsjedniku Ureda za registraciju lijekova, medicinskih sredstava i biocidnih proizvoda).

Provjereno: 2021-01