

GUTAP ORANGE
Gutaperka narandža rastvarač
Uputstvo za upotrebu
Prije upotrebe pažljivo pročitajte upute.



MEDICINSKI UREĐAJ SAMO ZA PROFESIONALNU STOMATOLOŠKU UPOTREBU

Polje primjene

Proizvod za otapanje gutaperče ispuna tokom endodontskog tretmana. Posebno se preporučuje:

- u slučaju teškog uklanjanja gutaperke iz zakrivljenih korijenskih kanala,
 - za vrlo dobro zgusnutu i stvrdnutu gutaperku i uklanjanje brtvila.
- Pomaže pri čišćenju dentalnih instrumenata od gutaperke i ostataka zaptivača.

Tehnički i medicinski podaci

Sastav: ulje slatke narandže 100%.

Pakovanje:

Bočica od žutog stakla sa kapaljkom, sadrži 10 ml tečnog proizvoda.

Mehanizam djelovanja

Gutap Orange je rastvarač. Otapa gutaperku i siler za korijenske kanale (posebno zaptivač na bazi cink oksida i eugenola), što ih čini lakšim za uklanjanje iz kanala korijena tijekom endodontskog tretmana.

Uputstvo za upotrebu

Uklanjanje gutaperke i zaptivača korijenskog kanala

- pomoću rotacionih instrumenata (npr. Gates-Glidden bušilica) uklonite materijal za punjenje iz komore zuba, stvarajući rezervoar za rastvarač,
- stavite 1-2 kapi rastvarača u utvrđeni prostor,
- nakon otprilike 2 minute progresivno uklonite omekšalu gutaperku endodontskom ručnom turpijom, npr. K-turpija, adekvatna prečniku korijenskog kanala (npr. ISO 15 ili 20) ili turpija tipa H,
- ako je potrebno koristiti sljedeću dozu proizvoda, staviti je u djelomično očišćen korijenski kanal,
- tokom postupka uklanjanja irigirati korijenske kanale sa 2-3% rastvorom natrijum hipohlorita,
- prestati koristiti rastvarač kada endodonska turpija dosegne udaljenost 3-4 mm od vrha korijena,
- precizno irigirati korijenske kanale (npr. sa 2-3% otopinom natrijum hipohlorita),
- ukloniti preostali materijal za punjenje endodontskim turpijama i temeljito irigirati korijenski kanal 2-3% otopinom natrijum hipohlorita,
- nakon toga slijedite protokol endodontskog ponovnog liječenja.

Čišćenje dentalnih instrumenata od gutaperke i ostataka zaptivača

- čisti instrument gazom natopljenom rastvaračem,
- isperite instrument toplom tekućom vodom.

Upozorenja, mjere opreza i kontraindikacije

- ☞ Nemojte koristiti proizvod u slučaju preosjetljivosti na ulje slatke narandže.
- ☞ Nemojte koristiti otapalo za uklanjanje gutaperke koja je ekstrudirana izvan vrha korijena.
- ☞ Ne dozvolite da se rastvarač infiltrira izvan vrha korena.
- ☞ Koristite koferdam tokom nanošenja proizvoda. Štiti meka tkiva usne šupljine od kontaminacije proizvodom.

Izaziva iritaciju kože.

Može izazvati alergijsku reakciju kože.

Može biti smrtonosan ako se proguta i uđe u disajne puteve.

Nositi zaštitne rukavice/zaštitnu odjeću/zaštitu za oči/zaštitu za lice.

AKO DOSPE NA KOŽU (ili kosu): Odmah skinuti svu kontaminiranu odeću. Isperite kožu vodom.

AKO SE PROGUTA: Isprati usta. NE izazivati povraćanje.

AKO SE UDIŠE: Ako osetite respiratorne simptome: Izvedite osobu na svež vazduh i ostavite da joj bude udobno da diše.

Zapaljiva tečnost i para.


Čuvati dalje od vrućine, vrućih površina, varnica, otvorenog plamena i drugih izvora paljenja. Zabranjeno pušenje.

Vrlo otrovno za vodeni svijet s dugotrajnim posljedicama.

Odložiti sadržaj/kontejner u skladu sa zahtjevima korištenja.

Mesto i uslovi skladištenja

Držite posudu dobro zatvorenu. **Čuvati van domašaja djece.**

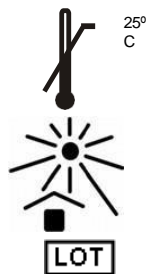

Čuvati na temperaturi ispod 25°C.

Čuvati dalje od sunčeve svjetlosti.

Broj serije je dat na vanjskom i primarnom pakovanju.



Rok trajanja je naveden na vanjskom i primarnom pakovanju. Nemojte koristiti proizvod nakon isteka roka valjanosti. Nakon otvaranja rok trajanja se ne mijenja pod uslovom da je ambalaža dobro zatvorena nakon svake upotrebe.



Proizvođač
CHEMA-ELEKTROMET
35-105 Rzeszów, Poland

Provjereno: 2022-06