



MEDICINSKI UREĐAJ SAMO ZA PROFESIONALNU STOMATOLOŠKU UPOTREBU

Namjena

Gel za kontrolu perigingivalnog krvarenja koje je rezultat intraoralnih stomatoloških zahvata. Pomaže prilikom retrakcije gingive; eliminiira krvarenje bez promjene boje i sedimentacije. Može se koristiti direktno za kontrolu krvarenja ili u kombinaciji sa koncem za retrakciju gingive.

Posebno se preporučuje:

- tokom lečenja karijesa,
- prilikom brušenja zuba za protetske nadoknade (krunice, fasete, mostovi, inleji),
- za kontrolu krvarenja uz uklanjanje fragmenata marginalne gingive ili obrasle papile iz unutrašnjosti kaviteta,
- za kontrolu krvarenja pulpe tokom terapije vitalne pulpe; efikasno je hemostatsko sredstvo,
- prilikom pripreme gingivalnog džepa i marginalne gingive prije protetskih ili ortodontskih otisaka, za vrlo visoku rubnu nepropusnost ispunja i protetskih nadomjestaka (kao i implantata), cementiranje ortodontskih traka i skaliranje; povećava efikasnost retrakcionog kabla.

Tehnički i medicinski podaci

Sastav: aluminijum hlorid heksahidrat, aroma mente, prečišćena voda, kinosol (konzervans), sredstvo za želiranje, natrijum hidroksid. 1 g proizvoda sadrži 0,2 g aluminij hlorid heksahidrata.

Primarno pakovanje: špric sa zaštitnim poklopcem, koji sadrži 5 g proizvoda u obliku gela.

Mehanizam djelovanja

HEMOSTAT® nanesen na područje krvarenja stvara površinski zaštitni sloj. Krvarenje prestaje nakon nekoliko minuta, što omogućava tretman u jednoj sesiji bez potrebe za privremenim previjanjem.

Uputstvo za upotrebu tokom kontrole krvarenja:

1. Skinite zaštitni poklopac sa šprica i lagano premotajte klip. Fiksirajte vrh za jednokratnu upotrebu sa finom četkom.
2. Koristite zamjenjivi vrh da utrljate gel u tkiva koja krvare.
3. Nakon zaustavljanja krvarenja isperite tkiva protokom vazduha i vode.
4. Ponovite ove korake ako se krvarenje nastavi.

Upute za upotrebu tokom uvlačenja užeta:

1. Utrljajte gel u krvarenje, koristeći jednokratni vrh sa finom četkom.
2. Stavite retrakcioni kabl u gingivalni džep napunjen hemostatskim gelom na 4 do 5 minuta.
3. Uklonite retrakcionu vrpču i isperite gingivalni džep protokom vazduha i vode, osušite strujom vazduha.
4. Ponovo utrljajte hemostatski gel u dno gingivalnog džepa, ostavite 1 minutu, na kraju isperite i osušite i uzmite otisak.
5. U slučaju krvarenja ponoviti postupak.

Upozorenja, mjere opreza i kontraindikacije



Prije svake upotrebe lagano premotajte klip kako biste izbjegli nanošenje prevelike količine proizvoda.



Obratite posebnu pažnju na precizno fiksiranje vrha za jednokratnu upotrebu. Prilikom nanošenja nemojte pretjerano pritiskati klip šprica.



Nakon svakog nanošenja proizvoda malo premotajte klip da biste uklonili proizvod sa vrha. Zatvorite špric zaštitnim poklopcem.



Uređaj sadrži aluminij hlorid (jaka kiselina) pa vrijeme primjene ne smije trajati duže od 5 minuta.



Pod uticajem fosfata ili alkalnih supstanci može doći do koagulacije (privremeno potamnjenje mesta preparata).



Ne koristiti za vrijeme akutnog gingivitisa i parodontitisa ili akutnog nekrotizirajućeg ulceroznog gingivitisa.



Nemojte koristiti proizvod u slučaju preosjetljivosti na njegove komponente.



Izaziva iritaciju kože. Izaziva ozbiljnu iritaciju oka. Može izazvati iritaciju disajnih puteva.

Nositi zaštitne rukavice/zaštitnu odjeću/zaštitu za oči/zaštitu za lice.

AKO DOSPE NA KOŽU: Oprati sa puno vode sa sapunom.

AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Uklonite kontaktna sočiva, ako postoje i ako ih je lako učiniti. Nastavite sa ispiranjem.

AKO SE UDIŠE: Izvesti osobu na svež vazduh i ostaviti da joj bude udobno za disanje.

Odložiti sadržaj/kontejner u skladu sa zahtjevima korištenja.

Mjesto i uslovi skladištenja



25°C

Store in temperature below 25°C.

Keep container tightly closed. *Keep out of the reach of children.*

Pridržavajte se uslova skladištenja. Čuvanje na temperaturi iznad 25°C uzrokuje smanjenje viskoznosti proizvoda.



Broj serije je dat na vanjskom i primarnom pakovanju.



Rok trajanja je naveden na vanjskom i primarnom pakovanju. Nemojte koristiti proizvod nakon isteka roka valjanosti. Nakon otvaranja rok trajanja se ne mijenja pod uslovom da je ambalaža dobro zatvorena nakon svake upotrebe.



Manufacturer:

CHEMA-ELEKTROMETS spółdzielnia Pracy

ul. Przemysłowa 9

35-105 Rzeszów

Poland

www.chema.rzeszow.pl

chema@chema.rzeszow.pl



Objašnjenja:

- važna uputstva

- obratite posebnu pažnju na tekstove označene ovim simbolom

Provjereno: 2023-07