

PULPOGEL®
Željezni sulfat gel za vitalnu pulpotomiju mliječnih zuba i kontrolu krvarenja
Uputstvo za upotrebu

Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo.



MEDICINSKO SREDSTVO SAMO ZA PROFESIONALNU STOMATOLOŠKU UPOTREBU

Polje primjene

Preparat na bazi željeznog sulfata namijenjen je za pulpotomiju - za vitalnu amputaciju mliječnih zuba.

Preparat je koristan za kontrolu manjih krvarenja koje je rezultat stomatološkog tretmana.

Tehnički i medicinski podaci

Sastav: željezni sulfat - 20%, sredstvo za želiranje, prečišćena voda.

Primarno pakovanje: špric sa zaštitnim poklopcem, koji sadrži 2,4 g proizvoda u obliku gela.

Mehanizam djelovanja

Gel indukuje hemostazu: prilikom kontakta sa krvlju formira proteinsko-sulfatne komplekse, koji zatvaraju krvne sudove. Njegova prednost je jednostavnost i brzina nanošenja: utrljajte ga u robove pulpe. Zatim, u slučaju vitalne pulpotomije, nakon vađenja iz komore (protokom vazduha i vode) primeniti ZOE i finalnu restauraciju.

Preparat se može koristiti kao hemostatsko sredstvo za kapilarno krvarenje tokom intraoralnih procedura. Snažno utrljan u krvarenje, stvara ugruške koagulirane krvi koji se nalaze u otvoru kapilare. Trljanje također odsiječe dio ugruška koji stoji izvan nivoa posude i formira kapicu koja trajno zatvara posudu. Tkiva treba čistiti jakim ispiranjem zraka i vode, čime se uklanjaju ugrušci, ostaci gela i potvrđuje djelotvornost hemostaze.

Uputstvo za upotrebu

- Skinite zaštitni poklopac sa šprica, lagano premotajte klip. Postavite vrh za jednokratnu upotrebu (*igla s tupim krajem, najbolje finom četkom*). Provjerite pravilnost distribucije gela.
- Nakon uklanjanja vrha za jednokratnu upotrebu, lagano premotajte klip da biste uklonili gel sa kraja šprica. Zatvorite špric zaštitnim poklopcem.

Vitalna pulpotomija:

1. Utrljajte preparat u robove pulpe. Nakon pojave prevelike količine tamnog ugruška, isperite vodom i aspirirajte pomoću aspiratora velike usisne snage. Za postizanje optimalnog efekta trljanja koristite aplikator sa četkom, npr. zubni infuzor.
2. Nakon zaustavljanja krvarenja isperite tkiva strujom vazduha i vode. Precizno uklonite ostatke gela i stvoreni ugrušak.
3. Preporučeno vrijeme primjene je oko 15 sekundi.
4. U slučaju perzistirajućeg krvarenja ponoviti postupak.
5. Krvarenje iz pulpnih rogova, uprkos primjeni gela, može ukazivati na pulpitis, u ovom slučaju je potrebno alternativno liječenje.
6. U slučaju vitalne amputacije, nakon ispiranja Pulpogel® iz komore i sušenja kaviteta, primijeniti ZOE i finalnu restauraciju.

Kontrola krvarenja:

1. Utrljajte tkiva koja krvare oko 15 sekundi da zaustavite krvarenje. Nakon pojave prevelike količine tamnog ugruška, isperite vodom i aspirirajte pomoću aspiratora velike usisne snage.
2. Nakon zaustavljanja krvarenja (*kada se novi ugrušak ne stvara*) isperite tkiva protokom zraka i vode. Neuklonjeni željezni sulfat može uzrokovati privremenu promjenu boje zubnog tkiva i može ometati postavljanje silikonskih materijala za otiske.
3. U slučaju krvarenja ponoviti postupak.
4. Preporučeno vrijeme primjene je oko 15 sekundi. Može se produžiti do 3 min. U slučaju pravilne primjene, učinak nastaje nakon desetak ili nekoliko desetina sekundi trljanja.

Upozorenja, mjere opreza i kontraindikacije

- Rizik od teškog oštećenja oka. Prilikom rada s proizvodom nosite zaštitne mjere (*zaštita za oči - najbolje su naočale ili štitić za lice*) kako biste izbjegli kontakt s očima.
- Željezni sulfat može uzrokovati privremenu promjenu boje parodontija i zuba.
- Uvijek je potrebno precizno očistiti ostatke gela i stvoreni ugrušak.
- Ne produžavajte preporučeno vrijeme primjene.
- Zbog niskog pH, preparat može oštetiti razmazni sloj pripremljenog dentina.
- Nemojte koristiti proizvod u slučaju preosjetljivosti na željezo (III) sulfat i polivinilpirolidon.
- Može zaprljati odjeću.
- Proizvod može ometati vezivanje polieterskih i polivinil silikatnih materijala za otiske.

Izaziva teška oštećenja oka. Izaziva iritaciju kože. Štetno ako se proguta.



Nosite zaštitne rukavice, zaštitnu odjeću, zaštitu za oči, zaštitu za lice.

U slučaju kontakta, odmah isperite sa dosta vode.


AKO SE PROGUTA: Isprati usta. Pozovite ljekara/liječnika ako se ne osjećate dobro.

AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Uklonite kontaktne leće, ako postoje i ako ih je lako učiniti. Nastavite sa ispiranjem.


Odložiti sadržaj/kontejner u skladu sa zahtjevima korištenja.

Mesto i uslovi skladištenja

Čuvati posudu dobro zatvorenu, *čuvati van domašaja dece.*

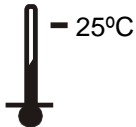

Čuvati na temperaturi ispod 25°C.

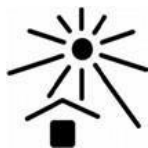

Čuvati dalje od sunčeve svjetlosti.



Broj serije je dat na vanjskom i primarnom pakovanju.



Rok trajanja je naveden na vanjskom i primarnom pakovanju. Nemojte koristiti proizvod nakon isteka roka valjanosti. Nakon otvaranja rok trajanja se ne mijenja pod uslovom da je ambalaža dobro zatvorena nakon svake upotrebe.

Svaki ozbiljan incident u vezi sa proizvodom treba prijaviti proizvođaču i odgovarajućoj agenciji.



Proizvođač:

CHEMA-ELEKTROMET

Spółdzielnia Pracyul. Przemysłowa 9

35-105 Rzeszów, Poland

www.chema.rzeszow.pl

chema@chema.rzeszow.pl



Provjereno: 2021-10