

# Any-Core®

## UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Any-Core je dvostruki radionepropusni kompozit koji ima izvrsna mehanička svojstva za nadogradnju jezgra. Ima odličan viskozitet za upotrebu u injekcijama korijenskog kanala za postcementaciju.

Smola za nadogradnju zubnog jezgra Any-Core je dvostruki radionepropusni kompozit koji ima izvrsna mehanička svojstva za nadogradnje jezgre. Ima odličan viskozitet za upotrebu u injekcijama korijenskog kanala za post cementaciju.

### ▣ Indikacije

1. Nadogradnja jezgre
2. Cementiranje korijenskog stupa

### ▣ Sastav

Bis-GMA 20~30%, Barijum staklo 50~65%

### ▣ Način primjene

1. Za nadogradnju jezgra
  - Izolirajte zub koji treba preparirati koferdamom.
  - Uklonite sve postojeće nadoknade i karijes sa zuba.
  - Nanesite sredstvo za jetkanje i isperite vodom.
  - Nanesite ljepilo prema uputama prema uputama za proizvodnju.
  - Ubrizgajte Any-Core u šupljinu.
  - Any-Core se može polimerizirati pomoću odgovarajućeg uređaja za svjetlosnu polimerizaciju najmanje 40 sekundi. (Max, debljina sloja  $\leq 4\text{mm}$ ) Tanji sloj ( $\leq 2\text{mm}$ ) je dovoljan za cca. 20 sekundi.
  - Oblikovanje matrice nakon što se materijal potpuno stvrdne.
  - Radno vrijeme: oko 90~120 sec.
  - Vrijeme postavljanja:
    - Svjetlosno polimeriziranje: 20~40 sec.
    - Hemijsko očvršćavanje: 5 min. (Intraoralno)
2. Za postcementacije
  - Očistite za površinu stupa prema po uputstvu proizvođača.
  - Pripremite korijenski kanal kako je potrebno za postavljanje stuba.
  - Nanesite nagrizanje i lijepljenje prema uputama prema uputama po uputstvu proizvođača.

Ako koristite vezu sa komponentom za svjetlosnu polimerizaciju, uklonite višak iz kanala prije polimerizacije.

- Nanesite Any-Core unutar kanala korijena za post fiksaciju. Ima radno vrijeme od 90~120 sekundi. Vezivna sredstva koja ste koristili mogu također smanjiti materijale radno vrijeme. Molimo slijedite upute proizvođača za sistem jetkanja i vezivanja.
- Umetnite držač u unutrašnjost korijenskog kanala podešavanjem pozicija.
  - a. Vrijeme polimerizacije pomoću odgovarajućeg uređaja za svjetlosnu polimerizaciju je 20 sekundi.
  - b. Vrijeme samootvrdnjavanja je 5 min. Očvršćava se u područjima u u koju svjetlost ne može prodrijeti hemijski.

### ▣ Kontraindikacije

1. Nemojte koristiti kod pacijenata sa anamnezom preosetljivosti ili alergije na smole na bazi metakrilata.
2. Ponovno korištenje priloženog vrha može uzrokovati unakrsnu infekciju, pa je ponovna upotreba vrha zabranjena.

### ▣ Oprez

1. Samo za stomatološku upotrebu.
2. Ne koristi se kod pacijenata sa istorijom osipa i preosetljivosti na dermatitis.
3. Ovaj proizvod se koristi samo za oralno tkivo. Pazite da vam ne uđe u oči.
4. Ako dođete u kontakt sa kožom ili dođete u oči, isperite ih nekoliko puta čistom vodom i po potrebi se obratite stručnjaku.
5. Ovaj proizvod je zabranjen za upotrebu osim za njegovu namjenu. A upotreba neprofesionalaca je zabranjena.
6. Pridržavajte se procedure i mjera opreza.
7. Držite ga podalje od dohvata korisnika koji nisu stomatološki, uključujući djecu, starije građane i druge.
8. Ne koristiti nakon isteka roka trajanja.
9. Postoji opasnost od oštećenja proizvoda, stoga nemojte previše udarati.
10. Zabranjena je upotreba ovog proizvoda osim komponenti.

#### ▣ Skladištenje

1. Ne čuvajte na visokoj temperaturi ili jakom svjetlu.
2. Čuvati na hladnom mestu. (2~25°C)
3. Držite poklopac šprice čvrsto kada ne koristite Any-Core.

#### ▣ Rok trajanja

- 2 godine od datuma proizvodnje

MEDICLUS CO., LTD.

br.1210, 134, Gongdan-ro, Heungdeok-gu, Cheongju-si,

Chungcheongbuk-do 28576, Koreja

Tel. +82-43-211-2877 / Fax. +82-43-211-2866

E-mail : sales@mdclus.com

Rev.5 2023. 04. 19 MDI-ACR04-05