

Any-Seal™ RC

Uputstvo za upotrebu

Zaptivač korijenskih kanala na bazi smole.

Any-Seal RC je siler za punjenje korijenskog kanala na bazi smole s optimalnom protočnošću koji koristi mješavinu baze i katalizatora.

▣ Indikacije

Trajno zaptivanje kanala korena.

▣ Sastav

- Epoksidna oligomerna smola 44%
- Etilen glikol salicilat 3%
- cirkonijum oksid 45%
- Kalcijum fosfat 8%

▣ Način primjene

1. Prije primjene
 - a. Provjerite datum isteka i pazite na kontaminiranu ambalažu.
 - b. Slijedite upute prije upotrebe.
 - c. Kada je pacijent spreman prije zahvata, skinite poklopac ovog proizvoda u smjeru suprotnom od kazaljke na satu i povežite priloženi Eco-Tip. Pomaže da se baza i katalizator ne miješaju kada se istovremeno isprazne. Alternativno, ako želite da koristite vrh za automatsko mešanje, okrenite ga za 90 stepeni u smeru kazaljke na satu i čvrsto ga zategnite.
 - d. U ovom trenutku gurnite klip dvostruke šprice da istisnete odgovarajuću količinu koja odgovara omjeru težine 1:1.
 - e. Osigurajte uređaj za zaštitu dišnih organa prije zahvata.
2. Aplikacija
 - a. Prije primjene Any-Seal RC temeljno pripremiti i irigirati korijenski kanal koristeći standardne endodontske tehnike.
 - b. Utisnite odgovarajuću količinu baze i katalizatora na podlogu za miješanje.
 - c. Mešajte 10-20 sekundi dok ne dobije jednoličnu boju slonovače.
 3. Vrh za automatsko miješanje ne prolazi kroz poseban proces miješanja
 4. [Radno vrijeme: 1 h, Vrijeme podešavanja: 3,5 h]
 - d. Stavite odgovarajuću količinu u materijal za punjenje kanala korijena i unesite ga glatko u kanal. (Tugga percha itd.)
 - e. Izbjegavajte stvaranje zračnih mjehurića i prepunjavanje kanala korijena.
 - f. Može se napraviti rendgenski snimak kako bi se osiguralo adekvatno zaptivanje apikala.
 - g. Nakon upotrebe, očistite sadržaj oko vrha i čvrsto ga čuvajte pomoću priloženog poklopca. (Uklonite korišteni vrh za automatsko miješanje i pohranite ga pomoću poklopca.)

▣ Kontraindikacije

1. Nemojte koristiti Any-Seal RC kod pacijenata koji imaju alergiju i upalu na Any-Seal RC i smolu na bazi epoksida.
2. Ponovno korištenje priloženog vrha može uzrokovati unakrsnu infekciju, tako da je ponovna upotreba vrha zabranjena.

▣ Oprez

1. Samo za stomatološku upotrebu
2. Ne koristi se kod pacijenata sa istorijom osipa i preosetljivosti na dermatitis.
3. Ovaj proizvod se koristi samo za oralno tkivo. Pazite da vam ne uđe u oči.
4. Ako dođe u kontakt sa kožom ili u oči, isperite ga nekoliko puta čistom vodom i po potrebi se obratite specijalistu.
5. Zabranjena je upotreba ovog proizvoda osim njegove namjene. A upotreba neprofesionalaca je zabranjena.
6. Pridržavajte se procedure i mjera opreza.
7. Držite ga podalje od dohvata korisnika koji nisu stomatološki, uključujući djecu, starije građane i druge.
8. Ne koristiti nakon isteka roka trajanja.
9. Postoji opasnost od oštećenja proizvoda, stoga nemojte previše udarati.
10. Upotreba drugih komponenti ovog proizvoda je zabranjena.

▣ Skladištenje

1. Držite poklopac šprice čvrsto kada ne koristite Any-Seal RC.
2. Izbjegavajte izlaganje direktnoj sunčevoj svjetlosti (1-30°C)
3. Čuvati na hladnom mestu.

▣ Rok trajanja

2 godine od datuma proizvodnje

MEDICLUS CO., LTD.

br.1210, 134, Gongdan-ro, Heungdeok-gu, Cheongju-si,

Chungcheongbuk-do 28576, Koreja

Tel. +82-43-211-2877 / Fax. +82-43-211-2866

E-mail : sales@mdclus.com

Rev. 4 2022. 04. 25 MDI-AS01-04