

Any-Temp® NE

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Neeugenol privremeni cement **Any-Temp NE** je cink oksidni privremeni cement za cementiranje privremene restauracije bez eugenola.

▣ Indikacije

1. Zubni privremeni cement.
2. Privremeni cement privremene restauracije.

▣ Sastav

Cink oksid 70~85%, kolofonij 50~60%, nonanska kiselina 30~40%

▣ Način primjene

1. Prije aplikacije
 - a. Provjerite datum isteka i pazite na kontaminiranu ambalažu.
 - b. Slijedite upute prije upotrebe.
 - c. Osigurajte zaštitni uređaj za respiratorne organe prije procedure.
 - d. Nakon upotrebe, odmah zatvorite poklopac kako biste smanjili promjenjivost.
2. Aplikacija
 - a. Ekstrudirajte **Any-Temp NE** na podlogu za miješanje.
 - b. Osušite pripremljene zube i unutrašnju površinu nadomjestaka.
 - c. Temeljno miješajte ispušteni **Any-Temp NE** 20 sekundi.
 - d. Nanesite izmiješani **Any-Temp NE** cement na unutrašnju površinu privremene restauracije.
[Radno vrijeme : 1 min, Vrijeme postavljanja : 3 min.]
 - e. Čvrsto postavite restauraciju u usta.
 - f. Odrežite višak cementa nakon što se materijal stegne.
[Otprilike 5 min. od početka miksa.]

▣ Kontraindikacije

1. Nemojte koristiti **Any-Temp NE** kod pacijenata koji imaju alergiju i upalu na kolofonij.
2. Ponovna upotreba vrha je zabranjena, jer može uzrokovati unakrsnu infekciju.
[**Napomena**] Ne miješati sa G.I cementom ili timol cementom jer ne očvršćava. Prilikom ekstrudiranja privremenog cementa iz podloge za miješanje, nije aktiviran osim ako se katalizator i baza ne pomiješaju u omjeru 1 prema 1.

▣ Oprez

1. Samo za stomatološku upotrebu.
2. Ne koristi se kod pacijenata sa istorijom osipa i preosetljivosti do dermatitisa.
3. Ovaj proizvod se koristi samo za oralno tkivo. Pazite da ne uđete tvoje oči.
4. Ako dođete u kontakt sa kožom ili dođete u oči, isperite ih nekoliko puta čistom vodom i po potrebi se obratite stručnjaku.
5. Ovaj proizvod je zabranjen za upotrebu osim za njegovu namjenu. A upotreba neprofesionalaca je zabranjena.
6. Pridržavajte se procedure i mjera opreza.
7. Držite ga podalje od dohvata korisnika koji nisu stomatološki, uključujući djecu, starije građane i druge.
8. Ne koristiti nakon isteka roka trajanja.
9. Postoji opasnost od oštećenja proizvoda, stoga nemojte previše udarati.

▣ Skladištenje

1. Nemojte ga čuvati u uslovima visoke temperature ili intenzivnog svjetla.
2. Zatvorite poklopac odmah nakon upotrebe.
3. Čuvati na suvom i hladnom mestu. (1~30°C)

▣ Rok trajanja

2 godine od datuma proizvodnje

MEDICLUS CO., LTD.

br.1210, 134, Gongdan-ro, Heungdeok-gu, Cheongju-si,

Chungcheongbuk-do 28576, Koreja

Tel. +82-43-211-2877 / Fax. +82-43-211-2866

E-mail : sales@mdclus.com

Rev.5 2022. 04. 25 MDI-AT02-05